

Protokol o periodické prohlídce zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, § 27

Zákazník	FN OLOMOUC		
Přístroj	CIRUS	Monitor	
Typ	10930	AS/3	
Výrobní číslo	9716006	812293	inv 18496

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ovládací prvky, signalizace
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fukční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ověření přesnosti měřicích funkcí (kalibrace)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Bezpečnostní test - měření

Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,13 mA max. 0,5 mA
	Příložná část	0,01 mA max. 0,05 mA
Izolační odpor	>20 MΩ	min. 20 MΩ
Odpor ochranného vodiče	0,18 Ω	max 0,2 Ω

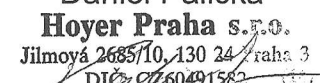
Reference: Servisní výkaz č.P 156 /07..... ze dne ...8.6.07.....

Výsledek prohlídky (závěr) : **vyhověl**

Prověřovaný zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek pro další používání při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 980447

Technik : **Daniel Palička** Provedeno dne : **8.6.2007**

Podpis :  Datum příští kontroly : **6/2008**

Hoyer Praha s.r.o.
Jilmová 2685/10, 130 24 Praha 3
DIČ: CZ60491582
tel.: +420 225 001 532, fax: +420 225 001 522
Provozovna: Malešická 2251/51, 130 00 Praha

Protokol o přeměření anestetického odpařovače
(v provozních podmínkách)

Objednatel: FN Olomouc

Typ: Sigma Elite ISO **v.č.** 099707

Výrobce: PENLON

K měření je použito plynového analyzátoru Datex-Ohmeda M-CAIOV, který je těsně před měřením kalibrován kalibračním plynem z tlakové láhve k tomu určené.

Měřeno při průtoku 5 L/min 100% kyslíku, teplota a barometrický tlak lokální !

Nastveno	0	0,2	0,4	0,6	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7	8
Měřeno	0	0,0	0,16	0,38	0,88	1,48	2,02	2,46	3,00	4,22	5,51	✓	✓	✓
Tolerance Low	0	0,14	0,3	0,45	0,8	1,2	1,6	2,0	2,4	3,2	4,0	4,8	5,6	6,4
Tolerance High	0,1	0,26	0,5	0,75	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6
RESULT	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Závěr: Odpařovač vyhovuje toleranci výrobce: ANO ~~NE~~

Doporučení:

*Odpařovač je používán s monitorem plynů.
Malá odchylka ve spodním rozsahu*

Měření provedl: Ing. Daniel Palička

Datum: 8. 6. 2007

Hoyer Praha s.r.o.
Jilmová 2685/10, 130 24 Praha 3
DIČ: CZ60491592 (16)
tel.: +420 225 601 532, fax: 4420 225 001 522
Provozovna: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3