

I 017134

Kontrola prostředku zdravotnické techniky kontrola č.: 2005/1386

Zákazník

Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 6

775 Olomouc

Kontaktní osoba paní Ludvíková

IČO 00098892

Objednávka zákazníka: telefonicky

Ref.číslo dodavatele: 20050267

Periodická kontrola PZT dle

zák. č.346/2003 Sb. § 28

Ověření stavu PZT dle

zák. č. 346/2003 Sb. § 52



Oxymetr pulzní

typ BCI 3301

výr.číslo 160198129

výrobce BCI-USA

rok uvedení 1996

inv.číslo 17138-001

elektrobezp. baterie

třída PZT II b v provozu ARO

FN-14-30

Záznam o provedených kontrolách a měření

pracovní postup: PP BCI 3301

1. Kontrola označení



2. Kontrola dokumentace



3. Kontrola vizuální



4. Kontrola zdroje a baterií



5. Kontrola nastavení a kalibrace



6. Kontrola příslušenství



jednorázový sensor-provést měření

nromalizovaným senzorem do 31.3.2006

Kontrola funkčnosti

8b) SpO2 modul

Tester SS-100A v.č.SS039516

3420 Onyx-DL3000vč.8K011

Simulace		Alarmy		
SpO2	p/min	SpO2	p/m	
50±2	80±2	L	-	☒
85±2	80±2	-	-	☒
100±2	80±2	H	-	☒
98±2	35±1	H	L	☒
98±2	250±5	H	H	☒

Alarmy

Optická signalizace

Zvuková signalizace

9. Zhodnocení stavu PZT, doporučení, varování, závěr a termíny následných kontrol

PZT nevykazuje zjevné závady a kontrolní testy proběhly bez závad

Kontrolovaný PZT splňuje požadavky podle §52 zák.346/2003 Sb.

Ověřit dle §52 do:

Kontrola dle §28 do: 15.12.2006 Hipot test do:

Kontrolu provedl

Kontrolu schválil

15.12.2005 Petr Kabrle

15.3.2006 Ing. Pavel Kabrle

Dokument je podepsán elektronicky řízeným způsobem.