

**Kontrola prostředku zdravotnické techniky kontrola č.: 2005/0539**

Zákazník

Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 6

775 Olomouc

Kontaktní osoba paní Ludvíková

IČO 00098892

Objednávka zákazníka: DO 8447

Ref. číslo dodavatele: 20050118

Periodická kontrola PZT dle  
zák. č. 346/2003 Sb. § 28 Ověření stavu PZT dle  
zák. č. 346/2003 Sb. § 52 

T 014138

**Oxymetr pulzní**

výrobce BCI-USA

elektrobezpečnost baterie

typ **BCI 3301**

rok uvedení 1996

klasifikační třída II b

výr. číslo **330031043**ref. číslo **FN-14-23**

v provozu - ARO Anestezie

**Záznam o provedených kontrolách a měření**1. Kontrola označení 2. Kontrola dokumentace 

3. Kontrola vizuální

*poškozený kryt-výměna krytu* 4. Kontrola baterií 5. Kontrola nastavení a kalibrace 6. Kontrola příslušenství 

Model

Výrobní číslo

Stav%

BCI 3044

150110172

75

**Kontrola funkčnosti**

8b) SpO2 modul

Tester SS-100A v.č.SS039516

Simulace		Alamy		
SpO2	p/min	SpO2	p/m	
50+-2	80+-2	L	-	<input checked="" type="checkbox"/>
85+-2	80+-2	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
100-2	80+-2	H	-	<input checked="" type="checkbox"/>
98+-2	35+-1	H	L	<input checked="" type="checkbox"/>
98+-2	250+-5	H	H	<input checked="" type="checkbox"/>

Alamy Optická signalizace Zvuková signalizace 

9. Zhodnocení stavu PZT, doporučení, varování, závěr a termíny následných kontrol

PZT nevykazuje zjevné závady a kontrolní testy proběhly bez závad

**Kontrolovaný PZT splňuje požadavky podle §52 zák.346/2003 Sb.**

Ověřit dle §52 do: 9.8.2007 Kontrola dle §28 do: 9.8.2006 Hipot test do:

Kontrolu provedl

4.8.2005

Ivo Augsten

Kontrolu schválil

9.8.2005

Ing. Pavel Kabrle

Dokument je podepsán elektronicky řízeným způsobem.