

# Periodická prohlídka přístroje

## Perfusor compact

Výrobce: B. Braun Melsungen AG

Obj. číslo přístroje: 8714827

Výrobní číslo přístroje: 42 554 Ev. č. D 029039-000

Uvedeno do provozu:

Prohlídka musí být prováděna pravidelně každých 24 měsíců. Periodickou prohlídku provádějte v souladu s návodem k použití a servisním návodem. Používejte výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje. Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Příslušenství a jeho doprovodná dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

Kontrolovat		Zjištěné nedostatky			Potvrz.	
<b>1. Vizuální prohlídka (čistota, kompletnost, poškození)</b>						
1.1	Uchycení stříkačky (držák, axiální uchycení, páčka a západka pohonu, senzor založení stříkačky)				<input checked="" type="checkbox"/>	
1.2	Klávesnice				<input checked="" type="checkbox"/>	
1.3	Síťová zásuvka a kabel				<input checked="" type="checkbox"/>	
1.4	Multifunkční konektor MFC a kabel				<input checked="" type="checkbox"/>	
1.5	Baterie/akumulátor, kontakty		Nové baterie		<input checked="" type="checkbox"/>	
1.6	Nožičky				<input checked="" type="checkbox"/>	
1.7	Svorka na stojan, západka svorky				<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>2. Funkční zkouška</b>						
2.1	Zapněte přístroj Porovnejte průběh testu LCD s návodem Zkontrolujte zvukový signál Porovnejte zadanou rychlost s displejem				<input checked="" type="checkbox"/>	
2.2	Proveďte funkci přivolání obsluhy (pomocí MFC) Pozn.: může být nastaveno a) statická signalizace b) dyn. signalizace s aktivací rozeznání smyčky c) dyn. signalizace bez aktivace rozeznání smyčky				<input checked="" type="checkbox"/>	
2.3	Přepněte přístroj do aku/bat. režimu a sledujte průběh testu Pozn.: při vybitém akumulátoru/baterii ji vyměňte a zopakujte test				<input checked="" type="checkbox"/>	
2.4	Proveďte signalizaci displeje „000b“ resp. „000a“ s aku				<input checked="" type="checkbox"/>	
2.5	Tlačítko umlčení alarmu				<input checked="" type="checkbox"/>	
2.6	Senzor založení pistu stříkačky				<input checked="" type="checkbox"/>	
3.0	Okluzní tlaky (alternativně jednou z metod)	manometr +střík. 50 ml	1(<0,6bar) <u>.....</u>	2(<0,9bar) <u>.....</u>	3(<1,2bar) <u>.....</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
		přípravek 770161/6	1(<40N) <u>78N</u>	2(<59N) <u>48N</u>	3(<75N) <u>60N</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.0	Volba stříkačky	OPS <input type="checkbox"/>	interní <input checked="" type="checkbox"/>	Eeprom <input type="checkbox"/>	XXX	
4.1	Přepínání stříkaček 20 /50 ml	Výrobce použ. stříkaček		Souhlasí s nastavením		<input checked="" type="checkbox"/>
		20 ml	B. Braun	Ano		<input checked="" type="checkbox"/>
		50 ml	B. Braun	Ano		<input checked="" type="checkbox"/>
4.2	Čitelnost tabulky stříkaček				<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>5.0 Zkouška elektrické bezpečnosti podle ČSN EN 60601</b>						
	Síťové napětí <u>230 V</u>	Odpor ochranného vodiče kabelu (<0,2 Ohm) <u>0,15 Ohm</u>	Unikající proud (<10 µA)	<u>5,0 µA</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.0	Dokumentace přístroje: • návod k obsluze ..... • provozní kniha ..... • bezpečnostní prohlídky ..... • evidence oprav .....				<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
7.0	Příslušenství (MFC, kabel napájení 12 V, kabel přivolání obsluhy) .....				<input checked="" type="checkbox"/>	
8.0	Speciální nastavení: Omezení rychl. dávkování: ...99,9 ml/h. Omezení rychl. dávkování bolusu 800 ml/h.					
<b>Výsledek prohlídky:</b>						
Byly zjištěny nedostatky, které mohou způsobit ohrožení pacienta, obsluhy nebo okolí. <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE						
Pokud ano, které: .....						
Doporučená opatření: .....						
Datum příští prohlídky: 08/2010	Prohlídku provedl: 31.7. 2008 Tománek podpis:	Přístroj předán: datum 07.8. 2008 podpis:				

Záznam o provedené kontrole uložte u provozní dokumentace přístroje.

IČ: 485 86 285  
DIČ: CZ48586285

B. Braun Medical s.r.o.  
Servisní centrum  
HOTLINE  
Tel. +420-271 091 555  
Fax +420-271 091 552