

PROTOKOL O PROVEDENÍ PERIODICKÉ PROHLÍDKY

na kl. K4L
amst.
Syringe barrel clamp
0131-0149

Datum provedení prohlídky: 7.3.2007

3400
pumpa Graseby 3100 / výrobní číslo:

020 696 1φ18100

| Krok | Test | provedeno | výsledek/poznámka/naměřené hodnoty |
|------|---|-----------|---|
| 1 | Mechanická prohlídka | ✓ | TOTAL HOURS: 4244h |
| 2 | Zkouška elektrické bezpečnosti provedena přístrojem Metra typ PU194DELTA-10A výr. číslo: 115513010 | ✓ | Izolační odpor (Mohm) : Unikající proud (mA) : |
| 3 | Po prvním zapnutí | ✓ | |
| 4 | Čidla velikosti stříkačky | ✓ | |
| 5 | Membránová tlačítka a displej | ✓ | |
| 6 | Výpadek napájení | ✓ | |
| 7 | Lineární přesnost | ✓ | měřeno dle předpisů výrobce přístrojem 0131-0230 naměřená odchylka: ... - 0,10 povolená odchylka: 18mm +/-0,3mm |
| 8 | Okluze | ✓ | |
| 9 | Vyrovnění svorky pístku | ✓ | |
| 10 | Alarm otevřené svorky pístku a uvolněného vodícího šroubu | ✓ | |
| 11a | výstražné zprávy "NEARLY EMPTY" a "EMPTY" | ✓ | |
| 11b | Alarm "<3 mins to END (KVO=.5)" a "END (KVO=.5)" | ✓ | |

Celkové hodnocení:

přístroj je schopen bezpečného provozu : **ANO** / ~~NE~~

Podpis Technika :



Doporučené datum následující periodické prohlídky: 7.3.2008

Tel.: 272 761 350
Fax: 272 761 351

ASQA a.s., Za potokem 46, 106 00 Praha 10
e-mail: servis@asqa.cz www.asqa.cz

Posouzení vlastností a technického stavu

*ASQA a.s. potvrzuje, že níže uvedený přístroj splňuje
požadavky zákona 123/2000 Sb., § 52, odst. 4
a je možné jej používat při poskytování zdravotní péče.*

*Přístroj odpovídá technické specifikaci výrobce
Smiths Medical International Ltd.
(dříve Graseby Medical Ltd. nebo SIMS Graseby Ltd.)
platné v době jeho výroby.*

Popis: Graseby 3400 Syringe Pump

Ref. číslo: 0132-0728

Výrobní číslo: 020696

Vlastník: FN Olomouc

Certifikát vydán společností: **ASQA a.s.**

ASQA a.s.

Za potokem 46, 106 00 Praha 10
tel.: 272 761 350, fax: 272 761 351
IČO: 27125971, DIČ: CZ27125971

Číslo certifikátu: 07-0007

Autorizováno:



Datum: 09. 03. 2007

Výrobce doporučuje u tohoto typu přístroje periodickou prohlídku 1x ročně.

Doporučené datum následující periodické prohlídky: březen 2008