

Seznámení sester s provozem polohovacího lůžka GYN 17

TERRA:

Dubová Hana



Plachá Julie

Plachá Julie 6. 11. 08

Miřková Jana



Stojškalová Stanislava


Švrdlíková Danuše

Švrdlíková Danuše 6. 11. 08

Bendová Martina

Bendová Martina 18/11 08

Smókalová Katřin

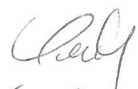

Šachrová Kateřina



PROTOKOL O ŠKOLENÍ POUŽITÍ VÝROBKU

Název produktu : **TERRA**
Zakázka číslo: **VT/2008/326**

Školená oblast	Školená vlastnost	Zaškolení proběhlo ANO/NE
Sesterský ovládací panel	Práce se sesterským panelem, popis funkčních tlačítek, zdůraznění funkce reanimační poloha, zámky tlačítek, neuzamykatelné funkce (CPR, TR pozice), umístění sesterského panelu.	
Resuscitační poloha	Nastavení resuscitační polohy pomocí sesterského panelu, pomocí červených madel umístěných na bocích lůžka.	
Postranice	Horní a dolní poloha, kontrola aretace, ovládání postranic.	
Ovládání koleček	Manipulace s lůžkem, brzda.	ANO
Čela	Možnosti odnímání čel z lůžka, aretace čel.	
Přívodní kabel	Umístění při transportu lůžka, vizuální kontrola kabelu (porucha izolace atp.).	
Ovládání lůžka ze všech ovladačů	Možnosti, rizika.	
Lýtkový díl	Manuální ovládání lýtkového dílu.	
Vážicí systém	Kompletní demonstrace a vyzkoušení vážicího systému lůžka.	
Podvozek	možnost/omezení odkládání předmětů na kryt podvozku.	
Nosnost lůžka	230 kg (pacient, matrace, veškeré ložní prádlo a příslušenství).	ANO
Prodloužení/zkrácení lůžka	Možnosti (prodloužení, přepravní poloha), rizika.	
Příslušenství (hrazda atp.)	Korektní pozice (držáky, pouzdra), možnosti použití na lůžku, zatížitelnost, rizika.	ANO
Zaškolení pacienta personálem	Povinnost zaškolení pacienta (viz. Návod k obsluze), možná rizika.	
Zálohová baterie	Signalizace vybité baterie, dobíjení, baterie s nízkou kapacitou.	
Matrace	Správná poloha a umístění matrace.	ANO
Transport lůžka	Pravidla, možnosti, rizika.	ANO
Čistitelnost a desinfekce lůžka	Postup (viz. Návod k obsluze), doporučené čisticí prostředky.	ANO
Periodické kontroly	Lůžko je nutné pravidelně kontrolovat autorizovaným servisem dle předpisu výrobce.	ANO
Sériové číslo	Umístění a identifikace lůžka.	ANO
Kontrolní místa	Seznámení s kontrolními místy, laická kontrola lůžka, rizika.	

Svým podpisem stvrzuji, že všechny funkce uvedeného produktu byly názorně předvedeny a odzkoušeny. Prohlašuji, že jsem byl(a) proškolen(a) a nejsem si vědom(a) ničeho, co by bránilo provozu produktu. V případě nejasností, či pochybností se nechám znovu proškolit, nebo se budu informovat u dodavatele produktu.

Funkční zařazení zástupce zákazníka:

Jméno příjmení : **Dužová**

Podpis: 

Dne: **6. 10. 2008** Razítko:

Školení provedl:

Podpis: 

Dne: **6. 10. 2008**

Chironax, spol. s r.o.
Servisní oddělení
Lýtková 42
274 01 Slaný

