

B | BRAUN

Periodická prohlídka přístroje:

Perfusor compact

Výrobce B.Braun Melsungen AG

Obj. číslo přístroje: 24 17824 Výrobní číslo přístroje: 29 251 Uvedeno do provozu:

Prohlídka musí být prováděna pravidelně každých 24 měsíců. Periodickou prohlídku provádějte v souladu s návodem k použití a servisním návodem. Používejte výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje. Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Příslušenství a jeho doprovodná dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

Kontrolovat		Zjištěné nedostatky		Potvrz.
1. Vizualní prohlídka (čistota, kompletnost, poškození)				
1.1	Uchycení stříkačky (držák, axiální uchycení, páčka a západka pohonu, senzor založení stříkačky)			✓
1.2	Klávesnice			✓
1.3	Síťová zásuvka a kabel			✓
1.4	Multi funkční konektor MFC a kabel			✓
1.5	Baterie / akumulátor, kontakty			✓
1.6	Nožičky			✓
1.7	Svorka na stojan, západka svorky			✓
2. Funkční zkouška				
2.1	Zapněte přístroj Porovnejte průběh testu LCD s návodem Zkontrolujte zvukový signál Porovnejte zadanou rychlost s displejem			✓
2.2	Proveďte funkci přivolání obsluhy (pomocí MFC) Pozn.: může být nastaveno a) statická signalizace b) dyn. signalizace s aktivací rozepnutí smyčky c) dyn. signalizace bez aktivace rozepnutí smyčky			✓
2.3	Přepněte přístroj do aku/bat. režimu a sledujte průběh testu Pozn.: při vybitém akumulátoru/baterii ji vyměňte a zopakujte test			✓
2.4	Proveďte signalizaci displeje „000b“ resp. „000a“ s aku			✓
2.5	Tlačítko umlčení alarmu			✓
2.6	Senzor založení pístu stříkačky			✓
3.0	Okluzní tlaky (alternativně jednou z metod)	manometr +střík. 50 ml 1(<0,6bar)	2(<0,9bar) 3(<1,2bar)	—
	přípravek 770161/6	1(<40N) 25N	2(<59N) 47N 3(<75N) 60N	
4.0	Volba stříkačky	OPS	interní	XXX
4.1	Přepínání stříkaček 20 / 50 ml	Výrobce použ. stříkaček 20 ml B. Braun 50 ml B. Braun	Souhlasí s nastavením Ano	✓
4.2	Čitelnost tabulky stříkaček			✓
5.0	Zkouška elektrické bezpečnosti podle ČSN EN 60601			
	Síťové napětí 220 V	Odpor ochranného vodiče vč. kabelu (<0,2 Ohm) 0,09 Ohm	Unikající proud (<10 µA) 2,10 µA	✓
6.0	Dokumentace přístroje: • návod k obsluze • provozní kniha • bezpečnostní prohlídky • evidence oprav			
7.0	Příslušenství (MFC, kabel napájení 12 V, kabel přivolání obsluhy)			
8.0	Speciální nastavení: Omezení rychl. dávkování: 99,9 ml/h. Omezení rychl. dávkování bolusu 200,0 ml/h.			
Výsledek prohlídky: Byly zjištěny nedostatky, které mohou způsobit ohrožení pacienta, obsluhy nebo okolí. ANO NE Pokud ano, které :				
Doporučená opatření:				
Datum příští prohlídky: 5/2009	Prohlídku provedl: datum: 28.5.2007 Tomáš Z podpis: Tomáš Z	Přístroj předán: datum: 28.5.2007 p. Voračková podpis: Voračková		

Záznam o provedené kontrole uložte u provozní dokumentace přístroje.

B | BRAUN

11
IČ: 485 86 285
DIČ: CZ48586285

B. Braun Medical s.r.o.
Servisní centrum
HOTLINE
Tel. +420-271 091 555
Fax +420-271 091 552