

B | BRAUN

## Perfusor compact

## Periodická prohlídka přístroje:

Výrobce B.Braun Melsungen AG

Obj. číslo přístroje: 84 14824 Výrobní číslo přístroje: 42658 Uvedeno do provozu: .....

Prohlídka musí být prováděna pravidelně každých 24 měsíců. Periodickou prohlídku provádějte v souladu s návodem k použití a servisním návodem. Používejte výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje. Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Příslušenství a jeho doprovodná dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

| Kontrolovat                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | Zjištěné nedostatky                                                       |                                                                                                       | Potvrz.                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1. Vizualní prohlídka (čistota, kompletnost, poškození)</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                       |                                     |
| 1.1                                                                                                                                                    | Uchycení stříkačky (držák, axiální uchycení, páčka a západka pohonu, senzor založení stříkačky)                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                       | ✓                                   |
| 1.2                                                                                                                                                    | Klávesnice                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                       | ✓                                   |
| 1.3                                                                                                                                                    | Sít'ová zásuvka a kabel                                                                                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                       | ✓                                   |
| 1.4                                                                                                                                                    | Multifunkční konektor MFC a kabel                                                                                                                                                                              |                                                                           | Nový kabel                                                                                            | ✓                                   |
| 1.5                                                                                                                                                    | Baterie / akumulátor, kontakty                                                                                                                                                                                 |                                                                           | Nové bat.                                                                                             | ✓                                   |
| 1.6                                                                                                                                                    | Nožičky                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                       | ✓                                   |
| 1.7                                                                                                                                                    | Svorka na stojan, západka svorky                                                                                                                                                                               |                                                                           |                                                                                                       | ✓                                   |
| <b>2. Funkční zkouška</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                       |                                     |
| 2.1                                                                                                                                                    | Zapněte přístroj<br>Porovnejte průběh testu LCD s návodem<br>Zkontrolujte zvukový signál<br>Porovnejte zadanou rychlost s displejem                                                                            |                                                                           |                                                                                                       | ✓                                   |
| 2.2                                                                                                                                                    | Proveďte funkci přivolání obsluhy (pomocí MFC)<br>Pozn.: může být nastaveno<br>a) statická signalizace<br>b) dyn. signalizace s aktivací rozepnutí smyčky<br>c) dyn. signalizace bez aktivace rozepnutí smyčky |                                                                           |                                                                                                       | ✓                                   |
| 2.3                                                                                                                                                    | Přepněte přístroj do aku/bat. režimu a sledujte průběh testu<br>Pozn.: při vybitém akumulátoru/baterii ji vyměňte a zopakujte test                                                                             |                                                                           |                                                                                                       | ✓                                   |
| 2.4                                                                                                                                                    | Proveďte signalizaci displeje „000b“ resp. „000a“ s aku                                                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                       | ✓                                   |
| 2.5                                                                                                                                                    | Tlačítko umlčení alarmu                                                                                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                       | ✓                                   |
| 2.6                                                                                                                                                    | Senzor založení pístu stříkačky                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                       | ✓                                   |
| 3.0                                                                                                                                                    | <b>Okluzní tlaky</b><br>(alternativně jednou z metod)                                                                                                                                                          | manometr<br>+střík. 50 ml<br>přípravek<br>770161/6                        | 1(<0,6bar) .....<br>2(<0,9bar) .....<br>3(<1,2bar) .....<br>1(<40N) 25N<br>2(<59N) 40N<br>3(<75N) 65N | ✓                                   |
| 4.0                                                                                                                                                    | <b>Volba stříkačky</b>                                                                                                                                                                                         | OPS                                                                       | interní                                                                                               | Eeprom                              |
| 4.1                                                                                                                                                    | Přepínání stříkaček<br>20 / 50 ml                                                                                                                                                                              | 20 ml<br>50 ml                                                            | Výrobce použ. stříkaček<br>B. Braun<br>B. Braun                                                       | Souhlasí s nastavením<br>Ano<br>Ano |
| 4.2                                                                                                                                                    | Čitelnost tabulky stříkaček                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                                                                                                       |                                     |
| 5.0                                                                                                                                                    | <b>Zkouška elektrické bezpečnosti podle ČSN EN 60601</b>                                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                       |                                     |
|                                                                                                                                                        | Sít'ové napětí 225 V                                                                                                                                                                                           | Odpor ochranného vodiče vč. kabelu (<0,2 Ohm) 0,07 Ohm                    | Unikající proud (<10 µA) <10 µA                                                                       | ✓                                   |
| 6.0                                                                                                                                                    | <b>Dokumentace přístroje:</b><br>• návod k obsluze .....<br>• provozní kniha .....<br>• bezpečnostní prohlídky .....<br>• evidence oprav .....                                                                 |                                                                           |                                                                                                       | ✓                                   |
| 7.0                                                                                                                                                    | <b>Příslušenství</b> (MFC, kabel napájení 12 V, kabel přivolání obsluhy) .....                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                                       | ✓                                   |
| 8.0                                                                                                                                                    | <b>Speciální nastavení:</b> Omezení rychl. dávkování: 99,9 ml/h. Omezení rychl. dávkování bolusu 200 ml/h.                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                       |                                     |
| <b>Výsledek prohlídky:</b><br>Byly zjištěny nedostatky, které mohou způsobit ohrožení pacienta, obsluhy nebo okolí. ANO NE<br>Pokud ano, které : ..... |                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                       |                                     |
| <b>Doporučená opatření:</b> .....                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                       |                                     |
| Datum příští prohlídky:<br>5/2009                                                                                                                      | Prohlídku provedl: datum: 28.5.2007<br>Tomášek<br>podpis: Tomášek                                                                                                                                              | Přístroj předán: datum: 28.5.2007<br>P. Vondráček<br>podpis: P. Vondráček |                                                                                                       |                                     |

Záznam o provedené kontrole uložte u provozní dokumentace přístroje.

B | BRAUN

11  
IČ: 485 86 285  
DIČ: CZ48586285

B. Braun Medical s.r.o.  
Servisní centrum  
HOTLINE  
Tel. +420-271 091 555  
Fax +420-271 091 552