

Periodická prohlídka přístroje:

Perfusor compact

Výrobce B.Braun Melsungen AG

Obj. číslo přístroje: 24 14 824 Výrobní číslo přístroje: 59 051 Uvedeno do provozu:

Prohlídka musí být prováděna pravidelně každých 24 měsíců. Periodickou prohlídku provádějte v souladu s návodem k použití a servisním návodem. Používejte výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje. Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Příslušenství a jeho doprovodná dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

Kontrolovat		Zjištěné nedostatky		Potvrz.	
1. Vizuální prohlídka (čistota, kompletnost, poškození)					
1.1	Uchycení stříkačky (držák, axiální uchycení, páčka a západka pohonu, senzor založení stříkačky)			✓	
1.2	Klávesnice			✓	
1.3	Sít'ová zásuvka a kabel			✓	
1.4	Multifunkční konektor MFC a kabel			✓	
1.5	Baterie / akumulátor, kontakty	Nová bat.		✓	
1.6	Nožičky			✓	
1.7	Svorka na stojan, západka svorky			✓	
2. Funkční zkouška					
2.1	Zapněte přístroj Porovnejte průběh testu LCD s návodem Zkontrolujte zvukový signál Porovnejte zadanou rychlost s displejem			✓	
2.2	Proveďte funkci přivolání obsluhy (pomocí MFC) Pozn.: může být nastaveno a) statická signalizace b) dyn. signalizace s aktivací rozeznutí smyčky c) dyn. signalizace bez aktivace rozeznutí smyčky			✓	
2.3	Přepněte přístroj do aku/bat. režimu a sledujte průběh testu Pozn.: při vybitém akumulátoru/baterii ji vyměňte a zopakujte test			✓	
2.4	Proveďte signalizaci displeje „000b“ resp. „000a“ s aku			✓	
2.5	Tlačítko umlčení alarmu			✓	
2.6	Senzor založení pistu stříkačky			✓	
3.0	Okluzní tlaky (alternativně jednou z metod)	manometr +střík. 50 ml 1(<0,6bar)	2(<0,9bar)	3(<1,2bar)	✓
	přípravek 770161/6	1(<40N) 25N	2(<59N) 45N	3(<75N) 65N	✓
4.0	Volba stříkačky	OPS	interní	Eeprom	XXX
4.1	Přepínání stříkaček 20 / 50 ml	Výrobce použ. stříkaček	Souhlasí s nastavením		
	20 ml	B. Braun	Ano		✓
	50 ml	B. Braun	Ano		✓
4.2	Čitelnost tabulky stříkaček				✓
5.0 Zkouška elektrické bezpečnosti podle ČSN EN 60601					
	Sít'ové napětí 225 V	Odpor ochranného vodiče vč. kabelu (<0,2 Ohm) 0,15 Ohm	Unikající proud (<10 µA) <10 µA		✓
6.0	Dokumentace přístroje: • návod k obsluze • provozní kniha • bezpečnostní prohlídky • evidence oprav				✓
7.0	Příslušenství (MFC, kabel napájení 12 V, kabel přivolání obsluhy)				✓
8.0	Speciální nastavení: Omezení rychl. dávkování: 99,9 ml/h. Omezení rychl. dávkování bolusu 200 ml/h.				
Výsledek prohlídky: Byly zjištěny nedostatky, které mohou způsobit ohrožení pacienta, obsluhy nebo okolí. ANO NE Pokud ano, které :					
Doporučená opatření:					
Datum příští prohlídky: 5 / 2009	Prohlídku provedl: datum: 28.5.2007 Tomášek podpis: Tomášek	Přístroj předán: datum: 28.5.2007 P. Voračková podpis: P. Voračková			

Záznam o provedené kontrole uložte u provozní dokumentace přístroje.

B | BRAUN

11 -
IČ: 485 86 285
DIČ: CZ48586285

B. Braun Medical s.r.o.
Servisní centrum
HOTLINE
Tel. +420-271 091 555
Fax +420-271 091 552