

Periodická prohlídka přístroje:

Výrobce B.Braun Melsungen AG

B | BRAUN
Perfusor compact

Obj. číslo přístroje: 84 14 824 Výrobní číslo přístroje: 89 197 Uvedeno do provozu:

Prohlídka musí být prováděna pravidelně každých 24 měsíců. Periodickou prohlídku provádějte v souladu s návodem k použití a servisním návodem. Používejte výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje. Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Příslušenství a jeho doprovodná dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

Kontrolovat		Zjištěné nedostatky		Potvrz.	
1. Vizuální prohlídka (čistota, kompletnost, poškození)					
1.1	Uchycení stříkačky (držák, axiální uchycení, páčka a západka pohonu, senzor založení stříkačky)			✓	
1.2	Klávesnice			✓	
1.3	Síťová zásuvka a kabel			✓	
1.4	Multifunkční konektor MFC a kabel			✓	
1.5	Baterie / akumulátor, kontakty			✓	
1.6	Nožičky			✓	
1.7	Svorka na stojan, západka svorky			✓	
2. Funkční zkouška					
2.1	Zapněte přístroj Porovnejte průběh testu LCD s návodem Zkontrolujte zvukový signál Porovnejte zadanou rychlost s displejem			✓	
2.2	Proveďte funkci přivolání obsluhy (pomocí MFC) Pozn.: může být nastaveno a) statická signalizace b) dyn. signalizace s aktivací rozeznání smyčky c) dyn. signalizace bez aktivace rozeznání smyčky			✓	
2.3	Přepněte přístroj do aku/bat. režimu a sledujte průběh testu Pozn.: při vybitém akumulátoru/baterii ji vyměňte a zopakujte test			✓	
2.4	Proveďte signalizaci displeje „000b“ resp. „000a“ s aku			✓	
2.5	Tlačítko umlčení alarmu			✓	
2.6	Senzor založení pistu stříkačky			✓	
3.0	Okluzní tlaky (alternativně jednou z metod)	manometr +střík. 50 ml přípravek 770161/6	1(<0,6bar) 2(<0,9bar) 3(<1,2bar)	✓	
4.0	Volba stříkačky	OPS	interní	Eeprom	XXX
4.1	Přepínání stříkaček 20 / 50 ml	20 ml 50 ml	Výrobce použ. stříkaček B. Braun B. Braun	Souhlasí s nastavením Ano Ano	✓ ✓
4.2	Čitelnost tabulky stříkaček				✓
5.0 Zkouška elektrické bezpečnosti podle ČSN EN 60601					
Síťové napětí 225 V		Odpor ochranného vodiče vč. kabelu (<0,2 Ohm) 0,06 Ohm	Unikající proud (<10 µA) <10 µA	✓	
6.0	Dokumentace přístroje: • návod k obsluze • provozní kniha • bezpečnostní prohlídky • evidence oprav			✓	
7.0	Příslušenství (MFC, kabel napájení 12 V, kabel přivolání obsluhy)				
8.0	Speciální nastavení: Omezení rychl. dávkování: 99,9 ml/h. Omezení rychl. dávkování bolusu 800,0 ml/h.				
Výsledek prohlídky: Byly zjištěny nedostatky, které mohou způsobit ohrožení pacienta, obsluhy nebo okolí. ANO NE Pokud ano, které :					
Doporučená opatření:					
Datum příští prohlídky: 5/2009		Prohlídku provedl: datum: 28.5.2007 podpis: Tomáš Z		Přístroj předán: datum: 28.5.2007 podpis: P. Voračova	

Záznam o provedené kontrole uložte u provozní dokumentace přístroje.

B | BRAUN

11
IČ: 485 86 285
DIČ: CZ48586285B. Braun Medical s.r.o.
Servisní centrum
HOTLINE
Tel: +420-271 091 555
Fax: +420-271 091 992