

Kontrola prostředku zdravotnické techniky kontrola č.: 2006/1661

Zákazník

Fakultní nemocnice Olomouc
I.P.Pavlova 6
775 Olomouc IČO 00098892
Kontaktní osoba paní Ludvíková Ivana

Objednávka zákazníka: DO 8834
Ref.číslo dodavatele: 20060269

Periodická kontrola PZT dle
zák. č.346/2003 Sb. § 28 ☒
Ověření stavu PZT dle ☐
zák. č. 346/2003 Sb. § 52

Oxymetr pulzní typ **BCI 3301** výr.číslo **390412434**
výrobce BCI-USA rok uvedení 1999 inv.číslo D027668
elektrobezp. baterie třída PZT II b v provozu P-G odd 17 A FN-14-14

Záznam o provedených kontrolách a měření pracovní postup: PP BCI 3301

1. Kontrola označení ☒
 2. Kontrola dokumentace ☒
 3. Kontrola vizuální ☒
 4. Kontrola zdroje a baterií ☒
 5. Kontrola nastavení a kalibrace ☒
 6. Kontrola příslušenství ☒
- Model Výrobní číslo Stav%
ALV bez 75 ☒

Kontrola funkčnosti**8b) SpO2 modul**

Tester SS-100A v.č.SS039516
3420,Onyx-DL3000vč.8K011

Simulace		Alamy		
SpO2	p/min	SpO2	p/m	
50+2	80+2	L	-	☒
85+2	80+2	-	-	☒
100-2	80+2	H	-	☒
98+2	35+1	H	L	☒
98+2	250+5	H	H	☒

Alarmy ☐
Optická signalizace ☒
Zvuková signalizace ☐

9. Zhodnocení stavu PZT, doporučení, varování, závěr a termíny následných kontrol
PZT nevykazuje zjevné závady a kontrolní testy proběhly bez závad

Kontrolovaný PZT splňuje požadavky podle §28 zák.346/2003 Sb.

Ověřit dle §52 do: Kontrola dle §28 do: 15.1.2008 Hipot test do:

Kontrolu provedl
13.12.2006 Ivo Augsten

Kontrolu schválil
5.1.2007 Ing. Pavel Kabrle

Dokument je podepsán elektronicky řízeným způsobem.

1991 - 2006 ČAS NÁS PROVĚŘIL - 15 let poskytujeme služby v oblastech pulzní oximetrie, monitorování vitálních funkcí a ka

ALWIL Medical s.r.o., V Podhájí 776/30, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: 475 210 451 fax: 475 209 183

e-mail : info@alwilmedical.com , www.alwilmedical.com

Certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 13485