

**Kontrola prostředku zdravotnické techniky kontrola č.: 2005/1042**

Zákazník

Fakultní nemocnice Olomouc

Objednávka zákazníka: DO 8447

Ref. číslo dodavatele: 20050221

I.P.Pavlova 6

Periodická kontrola PZT dle

775 Olomouc

IČO 00098892

zák. č. 346/2003 Sb. § 28 

Kontaktní osoba paní Ludvíková

Ověření stavu PZT dle

zák. č. 346/2003 Sb. § 52 

I 012262

**Oxymetr pulzní**typ **BCI 3301**výr. číslo **330032049**

výrobce BCI-USA

rok uvedení 1993

ref. číslo FN-14-27

elektrobezpečnost baterie

klasifikační třída II b

v provozu - Děti 28B ✓

**Záznam o provedených kontrolách a měření**

pracovní postup: PP BCI 3301

1. Kontrola označení 

BCI 3300 jest to samé jako BCI 3301

2. Kontrola dokumentace 3. Kontrola vizuální 4. Kontrola baterií 5. Kontrola nastavení a kalibrace 6. Kontrola příslušenství 

Model Výrobní číslo Stav%

jednorázová **Kontrola funkčnosti**

## 8b) SpO2 modul

Tester SS-100A v.č. SS039516

Simulace		Alamy		
SpO2	p/min	SpO2	p/m	
50+2	80+2	L	-	<input checked="" type="checkbox"/>
85+2	80+2	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
100-2	80+2	H	-	<input checked="" type="checkbox"/>
98+2	35+1	H	L	<input checked="" type="checkbox"/>
98+2	250+5	H	H	<input checked="" type="checkbox"/>
Alamy				<input checked="" type="checkbox"/>
Optická signalizace				<input checked="" type="checkbox"/>
Zvuková signalizace				<input checked="" type="checkbox"/>

9. Zhodnocení stavu PZT, doporučení, varování, závěr a termíny následných kontrol

PZT nevykazuje zjevné závady a kontrolní testy proběhly bez závad

Test SpO2-tester SS-100A v.č. SS03951676

**Kontrolovaný PZT splňuje požadavky podle §52 zák.346/2003 Sb.**

Ověřit dle §52 do: 30.11.2007 Kontrola dle §28 do: 30.11.2006 Hipot test do:

Kontrolu provedl

6.9.2005 Ivo Augsten

Kontrolu schválil

29.11.2005 Ing. Pavel Kabrle

Dokument je podepsán elektronicky řízeným způsobem.