

4. Kontrola zdroje a baterií ☒
Zdroj BCI 1612 R iz >99 MOhm měřeno na
R277 v.č. V1-1262

5. Kontrola nastavení a kalibrace ☒

6. Kontrola příslušenství ☒

Model Výrobní číslo Stav%
kalibrační ☒

Kontrola funkčnosti

8b) SpO2 modul

Tester SS-100A v.č. SS039516

3420, Onyx-DL3000 v.č. 8K011

Simulace		Alarmy		
SpO2	p/min	SpO2	p/m	
50±2	80±2	L	-	☒
85±2	80±2	-	-	☒
100±2	80±2	H	-	☒
98±2	35±1	H	L	☒
98±2	250±5	H	H	☒

Alarmy ☒

Optická signalizace ☒

Zvuková signalizace ☒

9. Zhodnocení stavu PZT, doporučení, varování, závěr a termíny následných kontrol
Výměna vadné prodlužovačky, sensoru a baterie

Kontrolovaný PZT splňuje požadavky podle §28 zák.346/2003 Sb.
Ověřit dle §52 do:

Kontrola dle §28 do: 18.12.2008 Hipot test do:

Kontrolu provedl

14.12.2007 Ivo Augsten

Kontrolu schválil

18.12.2007 Ing. Pavel Kabrle

Dokument je podepsán elektronicky řízeným způsobem.

od 1991 poskytujeme služby v oblastech pulzní oximetrie, kapnometrie a monitorování vitálních funkcí
ALWIL Medical s.r.o., V Pocháň 776/30, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: 475 210 451 fax: 475 209 183
e-mail: info@alwilmedical.com, www.alwilmedical.com

Certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 13485