

**TRANSKONTAKT - MEDICAL s.r.o.**

Na Zatlance 5, CZ -150 00 PRAHA 5

DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001

PROTOKOL č. 010 / 2007**o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.**

VÝROBNÍ ČÍSLO: <i>129 604</i> <i>i.e. 10180 39-000</i>	INFUZNÍ PUMPA ARCOMED VP 5000	NEMOCNICE: FN Olomouc I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
INSTALACE: <i>25.4.1997</i>		ODD.: <i>I. CHIR. JIP I</i>

Popis zkoušky	Povolení rozsah	Naměřené hodnoty
Stav skříně		<i>DOBŘE</i>
Elektro bezpečnostní testy	Ri (MΩ) > 50, Rz (Ω) 0,1	Ri <i>50 MΩ</i> Rz <i>0,03 Ω</i> ZO1 4259421
Baterie/Dobíjecí proud		<i>9,6V 1,7Ah / 75mA</i>
Funkční testy:	ALARM, ČERPADLO, DVÍŘKA, DISPLEJ	<i>DOBŘE</i>
Spínače:	KAPKY, VZDUCH	<i>DOBŘE</i>
Kalibrace:	± 5 % <i>15-125</i>	<i>100, 300, 1ML / 40.</i>
Výstupní tlak:	150 kPa - 250 kPa	<i>ODPOVĚDA</i>
Bezpečnostní tlak:	NASTAVENÍ <i>7-4</i>	<i>70 kPa</i>
Stav mechanických dílů:		<i>DOBŘE</i>

Zařízení bylo podrobeno testu v délce 1 2 3 4 5 6 hodin.Zak.list č.: *035/2007*Zkoušené zařízení odpovídá ~~neodpovídá~~ TP a vyhovuje ~~nevyhovuje~~ provozu.Měření provedeno dne: **10-12-2007**Termín další kontroly: *10.12.2009*Měření provedl: **SUCHOMEL Zdeněk**

Protokol převzal:

**TRANSKONTAKT s.r.o.**
MEDICAL
Na Zatlance 5
150 00 PRAHA 5
kancelář: Starobrněnská 13
602 00 BrnoSakulínská nemocnice Olomouc
odbor hlavního mechanika
dispečink oprav
I. P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
tel.: 585 440 125 fax: 585 442 529

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. Spisová značka: odd. C, vložka 11688

Bankovní spojení **ČSOB Praha** č. účtu **576455083/0300**IČO **45797803**DIČ **CZ45797803**Praha : Na Zatlance 5, 150 00 Praha 5
Brno : Starobrněnská 13, 602 00 Brno
e-mail: transkontakt@medicaltk.comZelená linka: 800 100 895
Tel.: 25156 4228 Fax: 25156 6226
Tel.: 54221 2616 Fax: 54221 4052
www stránky: www.medicaltk.com