

Martin Bičíště -BIČELS, Resslova 890, 500 02 Hradec Králové  
DIČ:CZ6404282192, IČO:15591051, Číslo účtu 21397/0300  
tel. 495 217 192 fax. 495 213 213  
Ministerstvo zdravotnictví C.j.: 6180A/02 - servis, os.pověř.

## BEZPEČNOSTNĚ-TECHNICKÁ KONTROLA ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

|                                                                        |                                                                                                |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ přístroje:</b><br>injekční dávkovač<br>Graseby 3100<br><br>II b | <b>Výrobní číslo :</b><br>036517<br><br><b>Invent. číslo:</b><br>I018062-000<br><br><b>ID:</b> | <b>Uživatel:</b><br>Fakultní nemocnice Olomouc<br>dispečink oprav<br>I.P.Pavlova 6<br>77520 OLOMOUC<br><br><b>Oddělení:</b><br>Ortopedická klinika JIP 29A |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Bezpečnostně-technická prohlídka je prováděna v souladu s návodem k použití a servisním návodem.

Použity výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje.

Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Přísluš. a dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

| Kontrolovat                     | Zjištěné nedostatky | Poznámky     | Potvrzení |
|---------------------------------|---------------------|--------------|-----------|
| Kryt                            |                     |              | OK        |
| Klávesnice-folie/ovládací prvky |                     |              | OK        |
| Síťová zásuvka a kabel          |                     |              | OK        |
| Svěrka                          |                     |              | OK        |
| Baterie /akum./-záložní zdroj   |                     |              | OK        |
| Nožičky                         |                     |              | -         |
| Snímač tlaku                    |                     |              | OK        |
| Snímač založení stříkačky       |                     |              | OK        |
| Dokumentace                     |                     | nepředložena | -         |

### Funkční zkouška

|                                        |  |  |    |
|----------------------------------------|--|--|----|
| Průběh testu                           |  |  | OK |
| Zvukový-optický signál                 |  |  | OK |
| Reakce přístroje na vyvoditelné alarmy |  |  | OK |
| Okluzní tlak                           |  |  | OK |
| Kontrola kapacity akumulátoru          |  |  | OK |
| Signalizace displeje, indik. prvků     |  |  | OK |
| Test-umlčení alarmu                    |  |  | OK |
| Kontrola rychlosti dávkování           |  |  | OK |
| Přepínání stříkačky                    |  |  | OK |

### Zkouška elektrické bezpečnosti dle ČSN EN 60601

|                      |                                      |                                   |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Síťové nap.<br>230 V | Odpor ochr.vodiče vč.kabelu :<br>- Ω | Unikající proud :<br>/PE 0,002 mA |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|

### Výsledek kontroly

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| <b>Zařízení je schopno bezpečného provozu:</b> | ANO |
| <b>Pokud NE - důvod:</b>                       |     |

Výše uvedený zdravotnický prostředek splňuje ustanovení par.27,28 a 52, zákona č.123/2000 Sb.

|                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Datum příští kontroly:</b><br><br>červen 2008 | <b>Kontrolu provedl:</b><br>P.Man<br><br><b>Datum :</b> 22.6.2007<br><b>Podpis :</b> MARTIN BIČIŠTĚ - BIČELS<br>prodej - servis<br>Resslova 890<br>500 02 HRADEC KRÁLOV<br>tel. 495 217 192, fax 495 213 213 | <b>Přístroj předán:</b><br><br><b>Datum:</b><br><br><b>Podpis :</b> |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

### Použité měřicí přístroje:

Digitální tlakoměr CRESSTO DMU-R 1000, v.č. 2842/06

Analýzátor elektrických zařízení RM2051, v.č. 401174

|     |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
| 89  | FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC                   |
| 301 | I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc               |
| 113 | 588 441 111                                  |
|     | Ortopedická klinika                          |
|     | Intenzivní péče 6T6                          |
|     | Pověřený přednost: MUDr. Miroslav PACH, CSc. |