

Martin Bičíště -BIČELS, Resslova 890, 500 02 Hradec Králové
DIČ:CZ6404282192, IČO:15591051, Číslo účtu 21397/0300
tel. 495 217 192 fax. 495 213 213
Ministerstvo zdravotnictví C.j.: 6180A/02 - servis, os.pověř.

BEZPEČNOSTNĚ-TECHNICKÁ KONTROLA ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

Typ přístroje: injekční dávkovač Graseby 3100 II b	Výrobní číslo : 036551 Invent. číslo: 1018060 ID:	Uživatel: Fakultní nemocnice Olomouc dispečink oprav I.P.Pavlova 6 77520 OLOMOUC Oddělení: Ortopedie JIP 29A
--	--	--

Bezpečnostně-technická prohlídka je prováděna v souladu s návodem k použití a servisním návodem.

Použity výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje.

Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Přísluš. a dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

Kontrolovat	Zjištěné nedostatky	Poznámky	Potvrzení
Kryt			OK
Klávesnice-folie/ovládací prvky			OK
Síťová zásuvka a kabel			OK
Svěrka			OK
Baterie /akum./-záložní zdroj			OK
Nožičky			-
Snímač tlaku			OK
Snímač založení stříkačky			OK
Dokumentace		nepředložena	-

Funkční zkouška

Průběh testu			OK
Zvukový-optický signál			OK
Reakce přístroje na vyvoditelné alarmy			OK
Okluzní tlak			OK
Kontrola kapacity akumulátoru			OK
Signalizace displeje, indik. prvků			OK
Test-umlčení alarmu			OK
Kontrola rychlosti dávkování			OK
Přepínání stříkačky			OK

Zkouška elektrické bezpečnosti dle ČSN EN 60601

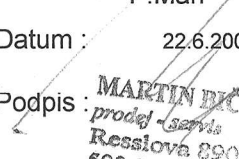
Síťové nap. 230 V	Odpor ochr.vodiče vč.kabelu : - Ω	Unikající proud : /PE 0,002 mA
----------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Výsledek kontroly

Zařízení je schopno bezpečného provozu: ANO

Pokud NE - důvod:

Výše uvedený zdravotnický prostředek splňuje ustanovení par.27,28 a 52, zákona č.123/2000 Sb.

Datum příští kontroly: červen 2008	Kontrolu provedl: P.Man Datum : 22.6.2007 Podpis :  MARTIN BIČIŠTĚ - BIČELS prodej - servis Resslova 890 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 2 tel. 495 217 192, fax 495 217 191	Přístroj předán: Datum: Podpis :  89 301 113 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Ortopedická klinika intenzivní péče 6T6 ředitel: MUDr. Miroslav PACH, CSc.
--	--	---

Použité měřicí přístroje:

Digitální tlakoměr CRESSTO DMU-R 1000, v.č. 2842/06

Analýzátor elektrických zařízení RM2051, v.č. 401174