

 POLYMED medicínská technika, s.r.o.		PROTOKOL O BEZPEČNOSTNÍ TECHNICKÉ PROHLÍDCE		č.
dle § 27, § 28 a § 52 zákona č. 346/2003 Sb.				
ID	INJEKČNÍ PUMPA TYPU:		2050	
	VÝROBNÍ ČÍSLO:		101095	
	KONTROLA	SPECIFIKACE	VÝSLEDEK, HODNOCENÍ	
VIZUÁLNÍ KONTROLA	KRYT	POŠKOZENÍ, VLAS. TRHLINY	✓	
	DRŽÁK, SVĚRKA	POŠKOZENÍ, ZÁVITY	✓	
	SIGNALIZAČNÍ PRVKY	PŘILEPENÍ, ČITELNOST, POŠKOZENÍ	✓	
	OVLÁDACÍ KNOFLÍKY	FUNKCE	✓	
	SÍŤOVÝ PŘÍVOD	POŠKOZENÍ	✓	
FUNKCE	TEST PŘI ZAPNUTÍ RYCHLOPOSUVU	16 x BLIKNUTÍ, ZŮSTANE SVÍTIT	✓	
	KONTROLA INDIKACÍ	POLOHA 0,0 ml / h	✓	
	PROVOZ NA AKUMULÁTOR	BLIKÁ INDIKACE BATERIE	✓	
	PROVOZ NA VNĚJŠÍ SS ZDROJ	SVÍTÍ INDIKACE EXTERNÍ NAPÁJENÍ	✓	
	KONTROLA KONCE DÁVEK	SIGNALIZACE PŘEDZVĚSTI 1-2ml + KONEC DÁVKY, MÉNĚ NEŽ 1ml	✓	
RYCHLOST DÁVKOVÁNÍ	STRÍKAČKA TYP: 20ml	RYCHLOST 9 ml / h, POLOHA 1X ODCHYLKA MAX ± 4%	100	
	STRÍKAČKA TYP: 50ml	RYCHLOST 60 ml / h ODCHYLKA MAX ± 4%	—	
OKLUZNÍ TLAK	STRÍKAČKA TYP: 20ml	TLAK PŘI 90 ml / h (tn 60kPa ± 20, tv 120 kPa ± 20)	106	
	STRÍKAČKA TYP: 50ml	TLAK PŘI 90 ml / h (tn 60kPa ± 20, tv 120 kPa ± 20)	—	
ELEKTROČÁST	KONTROLA EL. PEVNOSTI (SÍŤOVÝ PŘÍVOD - KOVOVÁ KOSTRA)	PŘI 4000V	vyhovuje	
	KONTROLA UNIKAJÍCÍHO PROUDU KRYTEM	≤ 100µA	6,59A	
	KONTROLA KAPACITY A STAVU AKUMULÁTORU	PŘI 10 ml / h - min. 5h PROVOZU	vyhovuje	
VÝSLEDEK KONTROLY:			vyhovuje	
Tento přístroj odpovídá technickým podmínkám výrobce a je možné jej dále používat ve zdravotnictví v péči o pacienta. DALŠÍ KONTROLU JE NUTNO PROVÉST NEJPOZDĚJI DO: 6.2009				

DATUM KONTROLY: 8.6.07

KONTROLOVAL: