



TRANSKONTAKT - MEDICAL s.r.o.

Na Zatlane 5, CZ -150 00 PRAHA 5

DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001

PROTOKOL č. **049/2008**

o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.

VYROBNÍ ČÍSLO: 026406 1.0, I 010 032 - 000	INFUZNÍ PUMPA ARCOMED VP 5000	NEMOCNICE: FN Olomouc I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
INSTALACE: 5.4.1994		ODD.: ORTOPEDIE JIP 29A

Popis zkoušky	Povolení rozsah	Naměřené hodnoty
Stav skříně		DOBŘÍ
Elektro bezpečnostní testy	Ri (MΩ) > 50, Rz (Ω) 0,1	Ri 50 Rz 0,07 ZO1 4259421
Baterie/Dobíjecí proud		12V 4Ah / 58mA
Funkční testy:	ALARM, ČERPADLO, DVÍŘKA, DISPLEJ	DOBŘÍ
Spínače:	KAPKY, VZDUCH	DOBŘÍ
Kalibrace:	± 5 % IS - 125	30, 50, 100 , 300 , 600 ml/hod.
Výstupní tlak:	150 kPa - 250 kPa	ODPOVÍDÁ
Bezpečnostní tlak:	NASTAVENÍ 4-4	65 kPa
Stav mechanických dílů:		DOBŘÍ

Zařízení bylo podrobeno testu v délce **1(2)3 4 5 6** hodin.

Zak.list č.: **015/2008**

Zkoušené zařízení odpovídá ~~neodpovídá~~ TP a vyhovuje ~~nevyhovuje~~ provozu.

Měření provedeno dne: **03 -06- 2008**

Termín další kontroly: **03. 06. 2010**

Měření provedl: **SUCHOMEL Zdeněk**

Protokol převzal:



TRANSKONTAKT s.r.o.
MEDICAL
Na Zatlane 5
150 00 PRAHA 5
kancelář: Starobrněnská 13
602 00 Brno

[Signature]

11 -06- 2008

Fakultní nemocnice Olomouc
odbor hlavního mechanika
dispečink oprav
I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
tel.: 582 443 125, fax: 588 442 525

[Signature]

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. Spisová značka: odd. C, vložka 11688

Bankovní spojení ČSOB Praha č. účtu **576455083/0300**

IČO **45797803**

DIČ **CZ45797803**

Praha : Na Zatlane 5, 150 00 Praha 5
Brno : Starobrněnská 13, 602 00 Brno
e-mail: transkontakt@medicaltk.com

Zelená linka: 800 100 895
Tel.: 25156 4228 Fax: 25156 6226
Tel.: 54221 2616 Fax: 54221 4052
Web stránky: www.medicaltk.com