

Medical Systems Management  
 P.O.Box 120, 261 81 Příbram  
 Tel.: +42(0) 306 20782  
 +42(0) 306 20603  
 Fax.: +42(0) 306 28649

Číslo zakázky: 220V-30001340

## Protokol o předání přístroje

Typ přístroje

N 180

Výrobní číslo

21406121

Datum uvedení do provozu

6. 3. 1994

Umístění přístroje (pracoviště)

FN, stěň Ortoped. 110

Adresa

44520 Olomouc, I. P. Pavlova 6

Telefon

068/444

Za kupujícího převzal

Dr. PEIDLHOVÝ J. M. A.

Za prodávajícího předal

J. Milec

Příslušenství

DS 100A (W00185), EC8 (B 1088)

Poznámky

Záruční lhůta: 12 měsíců, od data uvedení do provozu přísl. 6 měs. + bat.

MSM


MSM, spol. s r.o.  
 P.O. Box 120, Lhota u Příbramě 13  
 261 81 Příbram

(1)



Za prodávajícího

FAKULTNÍ NEMOCNICE  
 V OLOMOUCI  
 KLINIKA PRO ORTOPEDICKOU CHIRURGIU  
 přednostka  
 Doc. MUDr. Rudolf Dítmar, CSc.

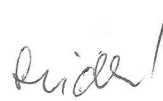

Za kupujícího

## Předávací funkční test

Úkon	Operace	Prvek	Funkce	
1.	Zapnout síť	Síťový vypínač	Indikátor napájení	0
2.	Zapnutí přístroje	ON/OFF	Autotest	0
		Dip Switch 1 OFF	Indikace NEO	0
		Dip Switch 1 ON	Indikac -	0
3.	Zapojit senzor	DS 100 A	SAO2 = 0	0
			Puls rate = 0	
			Senzor aktivován	0
4.	Aplikovat senzor	DS 100 A	SAO2 = 0	0
			Puls rate = 0	
			Bargraf = indikace	
5.	Alarm HIGH SAT Kontrola tov.nastavení	Ovladač, tlačítko Tlačítko Změna mezí->	SAO2=100 (rudá) Akustický signál Indikátor High Sat Hodnota SO2->rudá	0 0 0 0
6.	Alarm LOW SAT Kontrola tov.nastavení	Ovladač, tlačítko Tlačítko Změna mezí->	SAO2= 85 (rudá) Akustický signál Indikátor Low Sat Hodnota SO2->rudá	0 0 0 0
7.	Alarm HIGH RATE Kontrola tov.nastavení	Ovladač, tlačítko Tlačítko Změna mezí->	PULS RATE=140 Akustický signál Indikátor High Sat Hodnota SO2->rudá	0 0 0 0
8.	Alarm LOW RATE Kontrola tov.nastavení	Ovladač, tlačítko Tlačítko Změna mezí->	PULS RATE= 55 Akustický signál Indikátor Low Sat Hodnota SO2->rudá	0 0 0 0
9.	Kontrola režimu NEO	Dip Switch 1 OFF	Indikace NEO	0
10.	Alarm HIGH SAT Kontrola tov.nastavení	Ovladač, tlačítko Tlačítko Změna mezí->	SAO2= 95 (rudá) Akustický signál Indikátor High Sat Hodnota SO2->rudá	0 0 0 0
11.	Alarm LOW SAT Kontrola tov.nastavení	Ovladač, tlačítko Tlačítko Změna mezí->	SAO2= 80 (rudá) Akustický signál Indikátor Low Sat Hodnota SO2->rudá	0 0 0 0
12.	Alarm HIGH RATE Kontrola tov.nastavení	Ovladač, tlačítko Tlačítko Změna mezí->	PULS RATE=200 Akustický signál Indikátor High Sat Hodnota SO2->rudá	0 0 0 0
13.	Alarm LOW RATE Kontrola tov.nastavení	Ovladač, tlačítko Tlačítko Změna mezí->	PULS RATE=100 Akustický signál Indikátor Low Sat Hodnota SO2->rudá	0 0 0 0
14.	Akumulátorový provoz	Vypínač napájení vypnout	Indikátor Prov.na bat.	0