

ZDRAVO s.r.o. – autorizovaný servis

Registrace dle § 31 zák.č.123/2000 Sb.,na Ministerstvu zdravotnictví – Č.j.-Reg.č.: 18577/01 a 18579/01



Periodická bezpečnostně-technická kontrola REVIZNÍ PROTOKOL 52/03/87	Inventární číslo
Přezkoušel: Ing.Josef Kovář	Výrobní číslo: MME400 0500 95 5722
Uživatel/vlastník: FN Olomouc-ortopedická klinika -OP	Výrobce: Martin Medizin-Technik Druh přístroje:Elektrochirurgie-Gerät Přístroj-typ: ME 400 CF Rok výroby: 01/M-138/90
Zkušební předpis: VDE 0750 ☐ VDE 0751/IEC 601 ☒ Revize provedena: nařízením zák.č.123/2000 Sb ☒ po opravě ☐	
Výsledek zkoušky: ☒ 1. Měřené hodnoty – zadní strana zkušebního protokolu. a/ příloha BENDER – Unimet 1000 ST verze: 3.71-výr.č.: 0008053368, kalibr.protokol: 631 / 2003 b/ VF měření: Power Meter EPM2, výr.č.: 9213-0053, kalibr.protokol : B0530303 c/ SCOPEMETER FLUKE 99,výr.č.:DM 6180498,kalibr.protokol : 623 / 2003 ☒ 2. Zjištěné závadné body:rezavý obal..... ☒ 3. Závady nenarušující bezpečnost – přístroj může být používán. ☐ 4. Přístroj může být používán po odstranění výše uvedených závad. ☐ 5. Závady vyžadují opravu před dalším použitím přístroje, protože jinak by mohli být ohroženi pacienti, zaměstnanci nebo třetí osoby.	
Datum: 21.09. 2003 Podpis:	Příští prohlídka připadá na: 09/2004



Revizní protokol: 52/03/87 Typ přístroje: ME 400 CF Výrobní číslo: MME4000500955722

	je v pořádku	není v pořádku	odpadá kontr.	poznámky
1. typový štítek	X			
2. návod k použití	X			
3. popis přístroje	X			
4. ovládací části	X			
5. vyrovnaní potenciálu-připojení	X			
6. originální příslušenství?(jiný výrobce)	X			
7. VF kabel-vizuální kontrola	X			
8. nožní spínač	X			
9. způsob použití NE elektrody	X			
10. při chybějící NE elektrodě-žádný výstupní výkon	X			
11. kontrola zapojení NE elektrody (akustický signál u přístrojů s VF výkonem nad 50 W)	X			
12. funkční přezkoušení ručního a nožního spínače	X			
13. kontrola optické a akustické signalizace při VF-dodávce				
14. VF-měření výkonů (maximum na nominal. odporu)				
řez 1 na 500/ / Ohm: 342 Watt				
řez 2a na 500/ / Ohm: 315 Watt				
urolog. řez 1 na 500/700/ Ohm: 315/285 Watt				
urolog. řez 2 na 500/800/ Ohm: 282/248 Watt				
kontakt. koag. 1 na 300/ / Ohm: 252 Watt				
kontakt. koag. 2 na 500/ / Ohm: Watt				
sprejová koag. 2 na 1500/ / Ohm: 100 Watt				
BI řez 1 na 600/ / Ohm: Watt				
BI řez 2 na 600/ / Ohm: Watt				
BI koag. na 100/ / Ohm: 60 Watt				

Poznámky:

Elektrické měření: přezkoušení dle normy DIN IEC 601 nebo VDE 0751

- izolační odpor sítě proti obalu
- izolační odpor používané části
- měření odporu ochranného vedení
- nízkofrekvenční odváděný proud – normální případ
- nízkofrekvenční odváděný proud – 1.chybný případ
- odváděný proud obalu – normální případ
- odváděný proud obalu – 1.chyba ochranného vodiče
- odváděný proud obalu – 1.chyba sítě
- odváděný proud pacienta – normální případ
- odváděný proud pacienta – ojedinělá chyba ochranného vodiče
- odváděný proud pacienta – ojedinělá chyba sítě
- pomocný proud pacienta – normální případ
- pomocný proud pacienta – 1.chyba ochranného vodiče
- pomocný proud pacienta – 1.chyba sítě
- odváděný proud pacientem – vers.paralel. U na používané části
- dto – odváděný proud pacientem – fázově zaměřeno

a/ příloha BENDER
– Unimet 1000 ST
verze: 3.71
výr.č.:0008053368


Přístroj ke kontrole do:

09/ 2004

kým: FN Olomouc-ortop.klinika



Revizní protokol

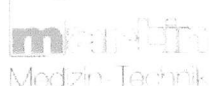

BENDER GmbH & Co.KG
Unimet 1000 ST

Typ/model ME 400 CF
Identif. číslo ... FN OLO-ort5722-9/03
Výrobce MARTIN med
Sériové číslo MME400 0500 955722
Norma měření IEC601-1
Třída ochrany Třída I
Příložená část ... Typ CF
Připojení pacienta 4
Jmenovité napětí . 230 V

Měření	Prahová hodnota	Výsledek
Odpor ochranného vodiče	#003 0.200	0.076 Ohm
PE měřicí proud	#083	25.6 A
Proud zátěží	#080	0.411 A
Provozní napětí	#081	232 V
Příkon	#082	0.095 kVA
Zemní unikající proud NC	#007 0.500	0.236 mA
Zemní unikající proud SFC	#010 1.000	0.481 mA
Unik.proud pac. NC DC	#223 0.010	< 0.001 mA
Unik.proud pac. NC AC	#323 0.010	< 0.001 mA
Unik.proud pac. SFC DC	#225 0.050	< 0.001 mA
Unik.proud pac. SFC AC	#325 0.050	0.003 mA
S přítomným sítovým napětím..	#033 0.050	0.010 mA
Pomocný proud pacientem NC DC	#235 0.010	< 0.001 mA
Pomocný proud pacientem NC AC	#335 0.010	< 0.001 mA
Pom. proud pacientem. SFC DC	#237 0.050	0.002 mA
Pom. proud pacientem. SFC AC	#337 0.050	< 0.001 mA

Poradí testovacích kroků

3, 83, 80, 81, 82, 7, 11, 12, 31, 33, 34, 223, 225, 229, 230, 235, 237
241, 242, 323, 325, 329, 330, 335, 337, 341, 342, 8, 32, 224, 226, 236
238, 324, 326, 336, 338, 9, 13, 227, 239, 327, 339, 10, 228, 240, 328
340

Výsledek testu: Test proveden

Datum 21.09.2003
Technik Ing. Josef Kovář
Podpis

Unimet 1000 ST Verze: 3.71 Sériové číslo: 0950843546

Výrobní číslo: 008053368



Přezkoušel

Ing. Josef Kovář

