

5 113 hodin

B BRAUN**Perfusor compact****Periodická prohlídka přístroje:**

Výrobce B.Braun Melsungen AG

Obj. číslo přístroje: 54 14 824 Výrobní číslo přístroje: 42 569 Uvedeno do provozu:

Prohlídka musí být prováděna pravidelně každých 24 měsíců. Periodickou prohlídku provádějte v souladu s návodem k použití a servisním návodem. Použijte výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje. Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Příslušenství a jeho doprovodná dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

Kontrolovat		Zjištěné nedostatky			Potvrz.	
1. Vizualní prohlídka (čistota, kompletnost, poškození)						
1.1	Uchycení stříkačky (držák, axiální uchycení, páčka a západka pohonu, senzor založení stříkačky)				✓	
1.2	Klávesnice				✓	
1.3	Síťová zásuvka a kabel				✓	
1.4	Multifunkční konektor MFC a kabel				✓	
1.5	Baterie / akumulátor, kontakty		Nový A110		✓	
1.6	Nožičky				✓	
1.7	Svorka na stojan, západka svorky				✓	
2. Funkční zkouška						
2.1	Zapněte přístroj Porovnejte průběh testu LCD s návodem Zkontrolujte zvukový signál Porovnejte zadanou rychlost s displejem				✓	
2.2	Proveďte funkci přivolání obsluhy (pomocí MFC) Pozn.: může být nastaveno a) statická signalizace b) dyn. signalizace s aktivací rozepnutí smyčky c) dyn. signalizace bez aktivace rozepnutí smyčky				✓	
2.3	Přepněte přístroj do aku/bat. režimu a sledujte průběh testu Pozn.: při vybitém akumulátoru/baterii ji vyměňte a zopakujte test				✓	
2.4	Proveďte signalizaci displeje „000b“ resp. „000a“ s aku				✓	
2.5	Tlačítko umlčení alarmu				✓	
2.6	Senzor založení pistu stříkačky				✓	
3.0	Okluzní tlaky (alternativně jednou z metod)	manometr +střík. 50 ml	1(<0,6bar)	2(<0,9bar)	3(<1,2bar)	✓
		přípravek 770161/6	1(<40N) 224	2(<59N) 40N	3(<75N) 614	✓
4.0	Volba stříkačky	OPS	interní ✓	Eeprom	XXX	
4.1	Přepínání stříkaček 20 / 50 ml		Výrobce použ. stříkaček	Souhlasí s nastavením		
		20 ml	B. Braun	ANO	✓	
		50 ml	B. Braun	ANO	✓	
4.2	Čitelnost tabulky stříkaček				✓	
5.0	Zkouška elektrické bezpečnosti podle ČSN EN 60601					
	Síťové napětí 130 V	Odpor ochranného vodiče vč. kabelu (<0,2 Ohm) 0,15 Ohm	Unikající proud (<10 µA) 4,0 µA		✓	
6.0	Dokumentace přístroje: • návod k obsluze • provozní kniha • bezpečnostní prohlídky • evidence oprav				✓	
7.0	Příslušenství (MFC, kabel napájení 12 V, kabel přivolání obsluhy)				✓	
8.0	Speciální nastavení: Omezení rychl. dávkování: 99,9 ml/h. Omezení rychl. dávkování bolusu 800,0 ml/h.					
Výsledek prohlídky:						
Byly zjištěny nedostatky, které mohou způsobit ohrožení pacienta, obsluhy nebo okolí. ANO <input type="radio"/> NE <input checked="" type="radio"/>						
Pokud ano, které:						
Doporučená opatření:						
Datum příští prohlídky: 8/2008	Prohlídku provedl: datum: 11.8.2006 Tománek	Přístroj předán: datum:				
	podpis:	podpis:				

Záznam o provedené kontrole uložte u provozní dokumentace přístroje.



Eli. Danavio