

ua kl.

4089

B | BRAUN

Perfusor compact

Periodická prohlídka přístroje:

Výrobce B.Braun Melsungen AG

Obj. číslo přístroje: 844814 Výrobní číslo přístroje: 42562 Uvedeno do provozu:

Prohlídka musí být prováděna pravidelně každých 24 měsíců. Periodickou prohlídku provádějte v souladu s návodem k použití a servisním návodem. Používejte výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje. Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Příslušenství a jeho doprovodná dokumentace musí být uvedena ve zkušební protokolů.

Kontrolovat		Zjištěné nedostatky			Potvrz.	
1. Vizualní prohlídka (čistota, kompletnost, poškození)						
1.1	Uchycení stříkačky (držák, axiální uchycení, páčka a západka pohonu, senzor založení stříkačky)				✓	
1.2	Klávesnice				✓	
1.3	Síťová zásuvka a kabel				✓	
1.4	Multifunkční konektor MFC a kabel				✓	
1.5	Baterie / akumulátor, kontakty		Nový		✓	
1.6	Nožičky				✓	
1.7	Svorka na stojan, západka svorky				✓	
2. Funkční zkouška						
2.1	Zapněte přístroj Porovnejte průběh testu LCD s návodem Zkontrolujte zvukový signál Porovnejte zadanou rychlost s displejem				✓	
2.2	Prověřte funkci přivolání obsluhy (pomocí MFC) Pozn.: může být nastaveno a) statická signalizace b) dyn. signalizace s aktivací rozeznání smyčky c) dyn. signalizace bez aktivace rozeznání smyčky				✓	
2.3	Přepněte přístroj do aku/bat. režimu a sledujte průběh testu Pozn.: při vybitém akumulátoru/baterii ji vyměňte a zopakujte test				✓	
2.4	Prověřte signalizaci displeje „000b“ resp. „000a“ s aku				✓	
2.5	Tlačítko umlčení alarmu				✓	
2.6	Senzor založení pístu stříkačky				✓	
3.0	Okluzní tlaky (alternativně jednou z metod)	manometr +střík. 50 ml	1(<0,6bar) -----	2(<0,9bar) -----	3(<1,2bar) -----	---
		přípravek 770161/6	1(<40N) <u>41N</u>	2(<59N) <u>41N</u>	3(<75N) <u>60N</u>	✓
4.0	Volba stříkačky	OPS	interní ✓	Eeprom	XXX	
4.1	Přepínání stříkaček 20 /50 ml	Výrobce použ. stříkaček		Souhlasí s nastavením		
		20 ml	<u>B. Braun</u>	<u>Ano</u>	✓	
		50 ml	<u>B. Braun</u>	<u>Ano</u>	✓	
4.2	Čitelnost tabulky stříkaček				✓	
5.0 Zkouška elektrické bezpečnosti podle ČSN EN 60601						
	Síťové napětí <u>230</u> V	Odpor ochranného vodiče vč. kabelu (<0,2 Ohm) <u>0,10</u> Ohm	Unikající proud (<10 µA) <u>4,2</u> µA		✓	
6.0	Dokumentace přístroje: • návod k obsluze • provozní kniha • bezpečnostní prohlídky • evidence oprav					
7.0	Příslušenství (MFC, kabel napájení 12 V, kabel přivolání obsluhy)	---				
8.0	Speciální nastavení: Omezení rychl. dávkování: <u>99,9</u> ml/h. Omezení rychl. dávkování bolusu <u>800,2</u> ml/h.					
Výsledek prohlídky:						
Byly zjištěny nedostatky, které mohou způsobit ohrožení pacienta, obsluhy nebo okolí. ANO NE						
Pokud ano, které :						
Doporučená opatření:						
Datum příští prohlídky: <u>9/1/2008</u>		Prohlídku provedl: datum: <u>20.9.06</u> Tomárek podpis: <u>Tomárek</u>		Přístroj předán: datum : podpis:		

Záznam o provedené kontrole uložte u provozní dokumentace přístroje.

B | BRAUN

B. Braun Medical s.r.o.

servisní středisko

HDS EuroCare Bruntál

Nádražní 27

792 01 BRUNTÁL

Tel.: (+420) 554 710 385

Fax: (+420) 554 710 386

Mob.: (+420) 602 749 713

F.1.01.