

Periodická prohlídka přístroje

Perfusor compact

B | BRAUN

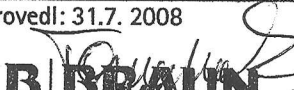
Výrobce: B. Braun Melsungen AG

Obj. číslo přístroje: 8714827

Výrobní číslo přístroje: 42 612 Ev. č. D 025291-000

Uvedeno do provozu:

Prohlídka musí být prováděna pravidelně každých 24 měsíců. Periodickou prohlídku provádějte v souladu s návodem k použití a servisním návodem. Používejte výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje. Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Příslušenství a jeho doprovodná dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

Kontrolovat		Zjištěné nedostatky			Potvrz.	
1. Vizualní prohlídka (čistota, kompletnost, poškození)						
1.1	Uchycení stříkačky (držák, axiální uchycení, páčka a západka pohonu, senzor založení stříkačky)				☒	
1.2	Klávesnice				☒	
1.3	Síťová zásuvka a kabel	Nový síť. zdroj			☒	
1.4	Multifunkční konektor MFC a kabel				☒	
1.5	Baterie/akumulátor, kontakty				☒	
1.6	Nožičky				☒	
1.7	Svorka na stojan, západka svorky				☒	
2. Funkční zkouška						
2.1	Zapněte přístroj Porovnejte průběh testu LCD s návodem Zkontrolujte zvukový signál Porovnejte zadanou rychlost s displejem				☒	
2.2	Proveďte funkci přivolání obsluhy (pomocí MFC) Pozn.: může být nastaveno a) statická signalizace b) dyn. signalizace s aktivací rozepnutí smyčky c) dyn. signalizace bez aktivace rozepnutí smyčky				☒	
2.3	Přepněte přístroj do aku/bat. režimu a sledujte průběh testu Pozn.: při vybitém akumulátoru/baterii ji vyměňte a zopakujte test				☒	
2.4	Proveďte signalizaci displeje „000b“ resp. „000a“ s aku				☒	
2.5	Tlačítko umlčení alarmu				☒	
2.6	Senzor založení pístu stříkačky				☒	
3.0	Okluzní tlaky (alternativně jednou z metod)	manometr +střík. 50 ml	1(<0,6bar)	2(<0,9bar)	3(<1,2bar)	☒
		přípravek 770161/6	1(<40N) 25 N	2(<59N) 43 N	3(<75N) 61 N	☒
4.0	Volba stříkačky	OPS ☐	interní ☒	Eeprom ☐	XXX	
4.1	Přepínání stříkaček 20 / 50 ml	Výrobce použ. stříkaček		Souhlasí s nastavením		☒
		20 ml	B. Braun	Ano		☒
		50 ml	B. Braun	Ano		☒
4.2	Čitelnost tabulky stříkaček				☒	
5.0	Zkouška elektrické bezpečnosti podle ČSN EN 60601					
	Síťové napětí 230 V	Odpor ochranného vodiče kabelu (<0,2 Ohm) 0,04 Ohm	Unikající proud (<10 µA)	 4,0 µA	☒	
6.0	Dokumentace přístroje:					
	• návod k obsluze				☒	
	• provozní kniha				☒	
	• bezpečnostní prohlídka				☒	
	• evidence oprav				☒	
7.0	Příslušenství (MFC, kabel napájení 12 V, kabel přivolání obsluhy)					
8.0	Speciální nastavení: Omezení rychl. dávkování: ...99,9 ml/h. Omezení rychl. dávkování bolusu 800 ml/h.					
Výsledek prohlídky:						
Byly zjištěny nedostatky, které mohou způsobit ohrožení pacienta, obsluhy nebo okolí. ☒ ANO ☐ NE						
Pokud ano, které:						
Doporučená opatření: Dobít akumulátor						
Datum příští prohlídky: 08/2010	Prohlídku provedl: 31.7. 2008 Tománek podpis: 	Přístroj předán: datum: 01.8. 2008 Fakultní nemocnice Olomouc odbor hlavního mechanika dispečink oprav I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUČ tel.: 588 443 125, fax: 588 442 529				