



TRANSKONTAKT - MEDICAL s.r.o.

Na Zatlance 5, CZ -150 00 PRAHA 5

DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001

PROTOKOL č. 061/2008

o kontrole zdravotnických prostředků dle § 28 a § 52 zák. 123/2000 Sb.

VÝROBNÍ ČÍSLO: 047406 i.c.: I01A020-000	INFUZNÍ PUMPA ARCOMED VP 5000	NEMOCNICE: FN Olomouc I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
INSTALACE: 3. 7. 1997		ODD.: UROLOGIE 20 Lůžka

Popis zkoušky	Povolení rozsah	Naměřené hodnoty
Stav skříně		DOBRY
Elektro bezpečnostní testy	Ri (MΩ) > 50, Rz (Ω) 0,1	Ri 50 Rz 0,08 ZO1 4259421
Baterie/Dobíjecí proud		12V 1,5Ah / 150mA
Funkční testy:	ALARM, ČERPADLO, DVÍŘKA, DISPLEJ	DOBRE
Spínače:	KAPKY, VZDUCH	DOBRE
Kalibrace:	± 5 % IS - 125	30, 50, (100) (300) 600 ml/hod.
Výstupní tlak:	150 kPa - 250 kPa	ODPOVÍDA
Bezpečnostní tlak:	NASTAVENÍ 4-4	30 kPa
Stav mechanických dílů:		DOBRY

Zařízení bylo podrobena testu v délce 1 (2) 3 4 5 6 hodin.

Zak.list č.: 070/2008

Zkoušené zařízení odpovídá ~~neodpovídá~~ TP a vyhovuje ~~nevyhovuje~~ provozu.

Měření provedeno dne: 01 -09- 2008

Termín další kontroly: 01. 09. 2010

Měření provedl: **SUCHOMEL Zdeněk**

Protokol převzal:



TRANSKONTAKT s.r.o.
MEDICAL
Na Zatlance 5
150 00 PRAHA 5
kancelář: Starobrněnská 13
602 00 Brno

Fakultní nemocnice Olomouc:
odbor hlavního mechanika
dispečink oprav
I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC
tel: 588 442 125, fax: 588 442 511

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. Spisová značka: odd.C, vložka 11688

Bankovní spojení ČSOB Praha č. účtu 576455083/0300

IČO 45797803

DIČ CZ45797803

Praha : Na Zatlance 5, 150 00 Praha 5

Brno : Starobrněnská 13, 602 00 Brno

e-mail: transkontakt @ medicaltk.com

Zelená linka: 800 100 895

Tel.: 25156 4228 Fax: 25156 6226

Tel.: 54221 2616 Fax: 54221 4052

Www stránky: www.medicaltk.com