

**Kontrola prostředku zdravotnické techniky kontrola č.: 2006/1663**

Fakultní nemocnice Olomouc

Objednávka zákazníka: DO 8834

Zákazník

I.P.Pavlova 6

Ref.číslo dodavatele: 20060269

775 Olomouc

IČO 00098892

Periodická kontrola PZT dle zák. č.346/2003 Sb. § 28 

Kontaktní osoba paní Ludvíková Ivana

Ověření stavu PZT dle zák. č. 346/2003 Sb. § 52 **Oxymetr pulzní**typ **BCI 3301**výr.číslo **260228606**

výrobce BCI-USA

rok uvedení 1998

inv.číslo **D027667**

elektrobezp. baterie

třída PZT II b v provozu ORL 14A

FN-14-17

**Záznam o provedených kontrolách a měření**

pracovní postup: PP BCI 3301

1. Kontrola označení 2. Kontrola dokumentace 3. Kontrola vizuální 4. Kontrola zdroje a baterií 5. Kontrola nastavení a kalibrace 6. Kontrola příslušenství 

Model Výrobní číslo Stav%

kalibrační **Kontrola funkčnosti****8b) SpO2 modul**Tester SS-100A v.č.SS039516  
3420,Onyx-DL3000vč.8K011

Simulace		Alarmy		
SpO2	p/min	SpO2	p/m	
50+2	80+2	L	-	<input checked="" type="checkbox"/>
85+2	80+2	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
100-2	80+2	H	-	<input checked="" type="checkbox"/>
98+2	35+1	H	L	<input checked="" type="checkbox"/>
98+2	250+5	H	H	<input checked="" type="checkbox"/>

Alarmy Optická signalizace Zvuková signalizace 9. Zhodnocení stavu PZT, doporučení, varování, závěr a termíny následných kontrol  
*PZT nevykazuje zjevné závady a kontrolní testy proběhly bez závad***Kontrolovaný PZT splňuje požadavky podle §28 zák.346/2003 Sb.**

Ověřit dle §52 do:

Kontrola dle §28 do: 15.1.2008 Hipot test do:

Kontrolu provedl

Kontrolu schválil

13.12.2006 Ivo Augsten

5.1.2007 Ing. Pavel Kabrle

Dokument je podepsán elektronicky řízeným způsobem.