

PERIODICKÁ BEZPEČNOSTNĚ-TECHNICKÁ KONTROLA INJEKČNÍ PUMPY GRASEBY 3xxx

Typ přístroje: inj.dávkořač Graseby 3100	Výrobní číslo : 036532	Uživatel: Fakultní nemocnice Olomouc dispečink oprav I.P.Pavlova 6 77520 OLOMOUC
II b	Invent. číslo: I018067-000	Oddělení: ORL JIP
	ID:	

Bezpečnostně-technická prohlídka je prováděna v souladu s návodem k použití a servisním návodem.

Použity výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje.

Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Přísluř. a dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

Prohlídka musí být prováděna každých: **12 měsíců****Zkušební přísluřenství**

Manometr CRESSTO DMU-R1000 v.č.2842/06 - Snímač byl porovnán s měřidlem CRESSTO s.r.o., ev.č. P262, návaznost na etalon ČMI zajiřtjena prostřednictvím AKL ČEZ Dukovany(C245), REVEX R2051 v.č. 0401174 a RM 2050 v.č. 4030008

přístroj ke kontrole elektr. spotřeb. - kalibrační list č. R2051/1307 a RM2050/044/M, Měřicí přípravek 0131-0230 ,

Kalibrační přípravek 0 - 2,0 bar-CERTIFICATE OF CONFORMITY : CC-067000-Rév.2

Kontrola vizuální

Kontrolovat	Poznámky	Zjiřtšené závady	Potvrzení
Kryty, konektory, snímač typu stříkačky snímač založení pistu stříkačky, síř.kabel, čistota, značení, přísluřenství			ano

Kontrola indikace

Operační a alarmové akustické indikátory			ano
--	--	--	-----

Test založení stříkačky

Kontrola uzavřetí palce	(8-10mm)		ano
Simulace a reakce na vyvoditelné alarby			ano

Test snímače pistu stříkačky

Simulace a reakce na vyvoditelné alarby			ano
---	--	--	-----

Test alarmu + indikace

Předzvěř konce dávky			ano
Konec dávky			
Okluzní tlak			
Střikačka			
Akumulátor			

Test okluzního tlaku

Alarm occlusion	(60-75 kPa / 3,6-4,1 kg)		3,6 kPa / kg
-----------------	----------------------------	--	--------------

Test přesnosti dávky

Rychlost 99,9 ml/h - 6 min	(17,7-18,3mm)		18,3 mm
Test funkce bolus (dle modelu)	Graseby 3100		nemá

Test napájení

Indikace síř/akumulátor a předzvěř alarmu			ano
Kapacita akumulátoru			ano

Zkouřka elektrické bezpečnosti dle ČSN EN 60601

Napájecí napětí:	230 V		
Unikající proud :	0,006 mA	Izolační odpor:	>20 MΩ

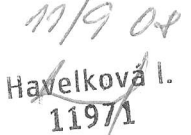
9. Výsledek kontroly

Zařítzení je schopno bezpečného provozu:

ANO

Pokud NE - důvod:

Výře uvedený zdravotnický prostředek splňuje ustanovení ř27, 28 a 52, zákona ř.123/2000Sb.

Datum přířtřít kontroly: 9/2009	Kontrolu provedl: R.Vejvoda Datum: 11.9.2008 Podpis:  Martin Bičířtřt - BIČEL S Resslova 890 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 2 tel. 495 217 094, fax 495 217 191 DIČ CZ6404282192 IČO 155 91 051	Přístroj předán: Datum: 11/9 08 Podpis:  Havelková I. 11971
--	--	---