

č. pokoje / č. lůžka č. na štítku lůžka

/ ☐

TECHNICARE CZ, s.r.o.

Protokol o prověření zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, §52, odstavec 4

Zákazník:	FN Olomouc, ORL — <i>lůžko 14A+B</i>
Objednávka:	DIS 080 08 66
Přístroj:	lůžko
Typ:	<i>TELNO +</i>
Výr. číslo:	<i>221 625</i>
Inv. číslo:	I 022 323 - 000

Vyhovuje:	Nevyhovuje:	Provedené kontroly
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☒	☐	Ovládací prvky, signalizace
☐	☒	Funkční kontrola v rozsahu dle výrobce

Zjištěné závady:

*Nefunkční palčovač uvnitř části
(nepřítomnost relet, motor je funkční)*

Měření elektrické bezpečnosti:

Měřená veličina:	Naměřeno:	Limit:
Odpor ochranného vodiče (R_{PE}):	<i>—</i> Ω	max. 0,3 Ω
Izolační odpor (R_{ISO}):	<i>> 20</i> M Ω	min. 20 M Ω
Celkový unikající proud (I_{SUB}):	Přístupná část: <i>0,008</i> mA	max. 0,5 mA
	Příložná část: <i>—</i> mA	max. 0,05 mA

Použitý měřicí přístroj: REVEX plus, v.č. 516 387

Výsledek kontroly – závěr:

Výše uvedené zjištěné závady doporučuji nechat odstranit. Poté bude tento zdravotnický prostředek opět plně funkční a bezpečný a bude možno ho používat při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Technik: Ing. Jaroslav Malý

Provedeno dne: 10. 6. 2008

Podpis:



Datum příští kontroly: červen 2009