

Bezpečnostní technická kontrola a prověření

technického stavu dle § 52 zák.č.346/2003 Sb. v platném znění. Prohlídka dle doporučení výrobce, odpovídá požadavkům § 27 zákona 346/2003 Sb. v platném znění

Zákazník: FN OLOMOUK
ORL ambulance

Objednávka zákazníka:

Přístroj: ICC 50

Typ: 10188-010

Výrobní číslo: A-1170

Zkouška ovládání pedálem:

Funkce MON/BIP

Zkouška ručního ovládání:

Funkce CUT/COAG

Výstupní výkon CUT:

MONO,ef1/50W/500ohm(50W+/-15%): 49,2 W

Výstupní výkon COAG:

BIP,50W/200ohm(50W+/-15%): 47,7 W

Soft,50W/200ohm(50W+/-15%): 57,2 W

Forced,50W/500ohm(50W+/-15%): 52,5 W

Vizuální kontrola:

Návod k použití

Popisky jsou čitelné

Odpor ochranného uzemňovacího vodiče:

Jistící kontakt na krytu (max 0,3 ohm) 0,02 ohm

Měření unikajících proudů:

Síťová část-přístupná část (max 1mA) 0,08 mA

Síťová část-příložná část (max 0,05 mA) 0,002 mA

Zkoušky funkčnosti monitorů:

Chyba na výstupu, RL=75ohm,CUT 1,Int 30W

Délka doby zapnutí

NE kontrola, R=200ohm (zelená LED)

NE kontrola, R=300 ohm (červená LED)

Zkoušky funkcí:

Ovládací tlačítka

LED svítí

Displeje funkční

Varovné tóny

Poznámka: Garantovaná výkonnost jednotlivých parametrů viz: KD 942509402

Zrevidovaný elektrochirurgický přístroj je vhodný a dostatečně účinný zdravotnický prostředek schopný bezpečného a spolehlivého provozu

Při měření použity tyto měřicí přístroje MEDITEST 50 v.č.: 200055

HF 150 v.č.: 106948300 131E

Datum kontroly: 14.11.06

Technik: [Signature]

Kontrola do: 11/2007

HOSPIMED spol.s r.o.
ZDRAVOTNICKÁ TECHNICKÁ
130 00 Praha 3, Malešická 2251/5
Tel.: 225 001 511, Fax: 225 001 522
a. DIČ: CZ00576853