



STERIPAK s.r.o.

Poděbradova 849 · 664 42 Modřice

Tel.: 547 422 240

Fax: 547 422 248

Email: info@steripak.cz

http://www.steripak.cz

eshop://www.zdravotnicke-zasobovani.cz

Držitel certifikátu ISO 9001:2001

Návod na obsluhu impulzní svářečky IS 203 CD, IS 303 CD a IS 403 CD

Obsluha svářečky musí být řádně seznámena s funkcí a užitím přístroje

Důležité: Vzhledem k tomu, že se jedná o nejjednodušší přístroje s minimální možností regulace, optimálnost sváru je třeba vyzkoušet!

Všeobecně: Kombinované obaly Steriking doporučujeme při svařování vkládat do čelistí fólií **směrem dolů**. Dosáhnete tak lepších výsledků
Svářečka vyhovuje požadavkům vyhlášky 195/2005 Sb. Vždy provádějte 2 sváry ve vzdálenosti ne větší než 5 mm od sebe.

Uvedení do provozu

- ✓ Zapojte přístroj do sítě (230 V)
- ✓ Obal vložte na pracovní plochu svářečky (u kombinovaných obalů fólií dolů)
- ✓ Regulátor nastavte na „0“
- ✓ Horní čelisti přitiskněte obal na spodní těleso svářečky
- ✓ Samočinně se provede svár
- ✓ Čelist uvolněte po slyšitelném zvukovém signálu; v tomto čase materiál zchladne a spoj zůstane pevný
- ✓ Pokud svár nedrží, na regulátoru mírně zvýšíme čas a zkusíme znovu – toto opakujeme do té doby, dokud není svár dostatečně pevný
- ✓ Obal posuňte a proveďte druhý svár

Pokud je svár optimální, není třeba každý den nastavení opakovat. Při vyšší četnosti svárů bude třeba úměrně zkrátit čas svařování (nutno vyzkoušet).

Šíře jednoho sváru je 3 mm, pro bezpečné uzavření obalů je nutné dodržet celkovou šíři sváru alespoň 8 mm, tzn. 2 sváry vedle sebe, přičemž vzdálenost mezi sváry nesmí být větší než 5 mm.

Údržba: Před čištěním a údržbou přístroje odpojte síťovou vidlice od sítě!
Povrch svařovací lišty udržujte čistý. Tavicí drát a teflonová páska se opotřebovávají úměrně četnosti použití a proto nejsou předmětem záruky.
Veškeré díly je nutno nahrazovat pouze originálními náhradními díly, aby nedošlo ke snížení bezpečnosti přístroje!

Servis: Zajišťujeme odborný záruční i pozáruční servis včetně preventivních prohlídek a revizí.
Záruka se poskytuje na dobu 12 měsíců na vady materiálů nebo výrobní závady.

Doporučení Po každých šesti měsících provozu je nutná servisní prohlídka pro zajištění spolehlivosti provedených svárů sterilizačních obalů.
Každých 12 měsíců nebo po každé opravě je nutné provedení elektrorevize přístroje.

| | |
|-------------------|-------------------|
| Dispečink oprav: | 5 4 7 4 2 2 2 4 9 |
| Servisní technik: | 6 0 3 2 3 7 0 7 5 |

STERIPAK

Svářečka IS 203, 303, 403

Návod pro obsluhu ruční impulzní svářečky

Obsluha svářečky musí být řádně seznámena s funkcí a užitím přístroje !

Vzhledem k tomu, že se jedná o nejjednodušší přístroje s minimální možností regulace , optimálnost sváru je třeba vyzkoušet !

Kombinované obaly **STERIKING** doporučujeme při svařování vkládat do čelistí **fólií směrem dolů**. Dosáhneme tak lepších výsledků.

- zapojte svářečku do sítě 220 V
- obal vložte na pracovní plochu svářečky (u kombinovaných folií dolů)
- regulátor nastavíme na nulu
- horní čelistí přitiskněte obal na spodní těleso svářečky
- samočinně se provede svár
- čelist uvolněte po slyšitelném zvukovém signálu v tomto čase materiál zchladne a spoj zůstane pevný
- pokud svár nedrží, na regulátoru mírně zvýšíme čas a zkusíme znovu, toto opakujeme do té doby, dokud svár dostatečně nedrží
- poté obal posuňte a opakujte svařování
- provádějte vždy minimálně 2 až 3 sváry vedle sebe

Pokud je svár optimální není třeba každý den nastavení opakovat. Při vyšší četnosti svárů bude třeba na přístroji čas snižovat.

Šíře jednoho sváru je 3 mm, pro bezpečné uzavření obalů je nutné dodržet celkovou šíři sváru alespoň 8 mm, tzn. 2 až 3 sváry po 3 mm vedle sebe, vzdálenost svárů by neměla být větší než 5 mm.

Údržba: Před čištěním a údržbou přístroje odpojte síťovou vidlici od sítě !

Povrch svařovací lišty udržujte čistý ! Tavící drát a teflonová páska se opotřebovávají úměrně časovému použití a proto nejsou předmětem záruky.

Veškeré díly je nutno nahrazovat pouze originálními náhradními díly, aby nedošlo ke snížení bezpečnosti přístroje.

Servis: Zajišťujeme odborný záruční i pozáruční servis včetně preventivních prohlídek a revizí. Záruka se poskytuje na dobu 6 měsíců na vady materiálů nebo výrobní závady.

Doporučení: Po každých 6-ti měsících provozu je nutná servisní prohlídka pro zajištění spolehlivosti provedených svárů sterilizačních obalů. Každých 12 měsíců nebo po každé opravě je nutná elektrevize přístroje.

Kontakt na servis:

pan Igor Palán, mob.: 603 237 075

Steripak, Poděbradova 849, 664 42 Modřice, tel/fax: 547 422 248

Steripak s.r.o., Poděbradova 849, 664 42 Modřice
tel./fax: 547 422 240, fax: 547 422 248, servis: 603 237 075
e-mail: info@steripak.cz <http://www.steripak.cz>

Zdráhalová J.

Karlíková D.

Uostálová D.

58515

Přerovská J.

7-2005210