

Servisní výkaz č.
846

Technik: Michal Hruša

Podpis: 

ALCON Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.

Servisní oddělení

Vinohradská 151, 130 00 Praha 3

Tel.: 225 377 300

Fax.: 225 377 305

Alcon

Servisní výkaz

Č. objednávky:

DIS0700279

Č. zákazníka:

1459

FN UK Oční klinika

Zákazník:

tř. I. P. Pavlova 6 Olomouc

Adresa:

Ivana Ludvíková, Dispečink oprav

Servis objednal:

Dne:



Tel/fax/e-mail:

Instalace:

Demo/

placement:

Záruka:

Zapůjčení přístroje/
příslušenství:

Servisní smlouva:

Katalogové číslo:

Pořadové číslo:

0

Popis závady / zakázka

Periodická prohlídka + problémy s biometrickou sondou
(někdy neměří)

Přístroj:

Ocuscan

Sériové číslo (sn):

1297-OCU

Pedál sn:

Datum

h

Provedené práce

Celkem

1/2h

2

Přístroj vycištěn, zkontrolován po mechanické i elektrické stránce a to dle servisního postupu firmy (viz záznam
o provedené kontrole "DataSheet for Ocuscan").

Problémy s biometrickou sondou ukazují na zlomený kabel - v budoucnu může být nutné sondu vyměnit.
Jako záloha byla ponechána servisní sonda s výr. č. A 1183.

PŘÍSTROJ VYHOVĚL VŠEM PŘEDEPSANÝM ROZSAHŮM Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A FUNKCE.
Příští periodická prohlídka: VI. / 2008.

Časový rozpis servisního výkonu

Údržba,
serv.smlouva

0

1/2h

Oprava,
upgrade

0

1/2h

Funkční test

0

1/2h

Instalace a
zaškolení

0

1/2h

Sazba za 1/2h

485,00

Celkový čas
servisního výkonu

0

Práce celkem

0,00

Časový rozpis cesty

Cesta

0

1/4h

Sazba za 1/4h

172,50

Cestovné celkem

0,00

Náhradní díly

Demo

Zapůjčení přístroje/příslušenství

Vrácení přístroje

Katalogové číslo

8065163168

Počet

Název

Periodická prohlídka

č. Alcon

104

Instalováno

Vráceno

Fakt.cena

9 000,00

Materiál celkem

Převzal zástupce fy. Alcon:

9 000,00

K fakturaci celkem bez DPH

9 000,00

**Bezpečnostně technická
kontrola**

Odpor ochranného
uzemňovacího vodiče

100

mΩ

Izolační odpor větší než

20

MΩ

Unikající proud mezi síťovou
a přístupnou částí

0,11

mA

Unikající proud mezi síťovou
a přílohou částí

0,002


mA

Potvrzujeme provedení servisního výkonu/ převzetí přístroje po opravě:

18.6.2007

Datum:

Razítko a podpis zákazníka:

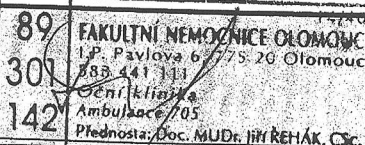

List serv.výkazu: modrý=serv.technik růžový=posílaný s fakturou zelený=zákazník žlutý=Alcon

Data Sheet for OcuScan

Customer FN Olomouc, Oč ní odd.

Service Request 846

Model OcuScan

System S/N 1297 - OCU

NOTE: Throughout this checklist either fill in the requested data or place a ☒ mark in the ☐.
Any boxes not checked must be explained in the notes section of this form.

Test Equipment:

EQUIPMENT	CALIBRATION NUMBER	CALIBRATION DUE DATE
EYE MODEL	SN 160	
CONTACT EYE MODEL		

Check one of the following: ☒ Preventive Maintenance, or
(complete section 2.1, then proceed to 2.2) ☐ Service Call/Installation/Upgrade
(start at section 2.2)

2.1 PREVENTIVE MAINTENANCE

- 2.1.1 ☒ Visual Inspection
- 2.1.2 ☒ Clean
- 2.1.3 ☒ Retrofit and Modifications
- 2.1.4 ☒ Cover Installed and Clean

2.2. SERVICE FUNCTIONAL TEST

- 2.2.1.2 ☒ System Hardware
- 2.2.2.8.3 ☒ CRT Alignment
- 2.2.3.1.2 ☒ Brightness
- 2.2.3.2.4 ☒ Contrast, and Focus Verification
- 2.2.4.1.4 ☒ System Noise Verification without probe
- 2.2.4.2.2 ☒ System Noise Verification with probe
- 2.2.5.1 3.02 Software Version Verification
- 2.2.6.1 ☒ Set Date and Time
- 2.2.7.8 ☒ Multiple Scan Test
- 2.2.8.4 ☒ Footswitch Test
- 2.2.8.6 ☒ 10 scans were saved
- 2.2.9.1 ☒ Keyboard Test
- 2.2.10.1 ☐ Remote Control
- 2.2.11.1 ☒ Keypad Test
- 2.2.12.7 ☒ User Interface test
- 2.2.13.10 ☒ Measurement Accuracy Verification
- 2.2.14.5 ☒ Print Report
- 2.2.15.1 ☒ Reset System

Alcon Pharmaceuticals
(Czech Republic) s.r.o.

Vinohradská 161
130 00 Praha 3

Ing. Michal Hruďa

Test Performed By (PRINT)

18.6.2007
Date

Notes:

DATE: JUN 18 2007

TIME: 12:17:39

OD

SCAN

PHAKIC

AVERAGE VALUE : 25.42 mm SD : 0.00

AXIAL LENGTH : 25.42 mm

1532m/s


1641m/s

1532m/s

AC = 3.56

L = 3.94

V = 17.92

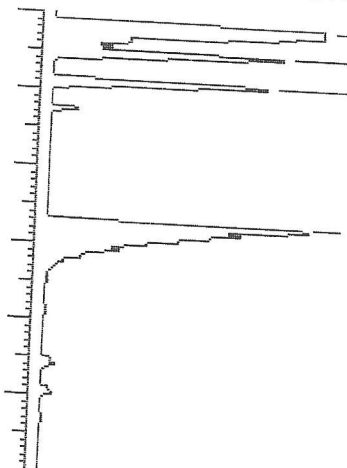

ALCON BIOPHYSIC

OcuScan

Ver:3.02