

Manipulace a činnost během provozu

Zvedání a spouštění pracovní plochy nebo segmentů se provádí pomocí ručního ovladače nebo nožní šlapky. Otáčení plochy lze provést po vytažení páčky z boku sedáku. Zablokovat plochu lze ve třech polohách po 90°.

Výměna a instalace dílů

Výrobce předpokládá zabezpečení odstraňování poruch a provádění větších oprav prostřednictvím servisu.

Ošetřování

Nečistoty čalouněných i kovových ploch křesla odstraňujte navlhčenou tkaninou pomocí běžných saponátových a dezinfekčních prostředků (sapon, pur, chloramin a pod.).

Na čištění koženky nepoužívejte kartáče, ostré předměty ani žádná organická rozpouštědla (benzín, aceton a pod.).

Čalouněné plochy křesla chraňte před přímým slunečním zářením, infrazářením, sálavým teplem a účinky horského slunce.

Kontrola a údržba

V průběhu provozu sledujte dotažení spojovacích součástí a kontrolujte stav elektrických vodičů.

Činnost při poruchách

Při poruše elektrického agregátu volejte servisní službu.

Seznam náhradních dílů

Vzhledem ke konstrukci křesla výrobce nedodává náhradní díly, ale zajišťuje servis.

V případě poškození je možno objednat následující celky :

spodní rám

elektropohony

kryty

čalouněnou pracovní plochu

Další díly dle požadavků. V objednávce uveďte, prosím, typ a datum výroby lehátka.