

Protokol o prověření zdravotnického prostředku periodickou kontrolou ve smyslu úplného znění zákona č. 123/2000 Sb.

Vlastník: Fakultní nemocnice Olomouc		Město: Olomouc
Ulice: I.P.Pavlova 6	PSČ: 775 20	Oddělení: Oční klinika, oper.sál
Číslo objednávky:Smlouva		Číslo CSO:10731

Modelové číslo	Seriové číslo	Datum další kontroly nejpozději	Poznámka
M1722B	M1722B <i>US 00109866</i>	Červen 2008	<i>I ** 019095</i>

Doporučujeme instalaci nové baterie

Výše uvedený zdravotnický prostředek (a instalované moduly a příslušenství) byl prověřen v rozsahu testů, předepsaných výrobcem.

VYHOVĚL po stránce funkční, elektrické a mechanické bezpečnosti a může být nadále používán ke stanovenému účelu.

****Upozornění:** jestliže nastane na tomto typu přístroje závada, není možno zaručit jeho úspěšnou opravu, protože přístroj je již mimo servisní podporu výrobce (nedostupnost některých náhradních dílů)

K přístroji JE používáno příslušenství a spotřební materiál doporučený výrobcem

Prověření provedl:

Jméno Ing. Josef Vrána
Datum 19.12.2007
podpis + razítko



S&T Plus s.r.o.
Novodvorská 994 ⑬
142 21 Praha 4
tel.: +420 239 047 505

S&T Plus s.r.o.

Novodvorská 994
142 21 Praha 4
Česká republika
tel.: +420 239 047 500
fax: +420 239 047 549
e-mail: info@snt-plus.cz
www.snt-plus.cz

PHB Bank Czech Republic a.s.
č.ú. 49146-2462700-CZK
č.ú. 49146-8602700-EUR
Swiftcode: BACXZZPP

IČ. 25701578
DIČ: CZ25701578

Den zápisu
do obchodního rejstříku
14. října 1998
oddíl C, vložka 62478
Městský soud v Praze

METRON QA-90

protokol o testu elektrické bezpečnosti

Technik : Ing. Josef Vrána

Firma : S&T Plus s.r.o., Novodvorská 994, 142 21 Praha 4

QA-90 no: 12395 ver : 04.06

Dne : 7.12.2007 Hod.: 14:55

Model : M1722B

Výrobní číslo

: US00109866

Typ : CodeMaster

Inventurní číslo

:

Výrobce: Hewlett-Packard/Agilent Technologies/Philips

Umístění/uzivatel : Oční klinika operační sál

Adresa: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Klasifikace přístroje : CL1

Mezní hodnoty podle: IEC 60601.1

TEST RESULTS

-- MODULE INFORMATION --

Module Code
PADDLESModule Type
BFNo of leads
1

-- SETUP DATA --

Power Up Delay Time : 2
 Stop at new module : No
 Multiple Protective Earth Tests : No
 Protective Earth test current : 25 A

Stop after new power config : No
 Stop before new power config : No
 Multiple Enclosure Tests : No
 External Isolating Transformer : No

Test	Limit	Result	Warning
Supply Voltage			
N-G		0,0 V	
L-G		232,6 V	
L-N		232,5 V	
Current Consumption		324 mA	
Protective Earth	200 mΩ	35 mΩ	
Insulating Resistance			
Applied Part-Case		>200 MΩ	
Mains-Case		>200 MΩ	
Earth Leakage Current			
OS	1000 μA	237 μA	
NC	500 μA	122 μA	
OS-RM	1000 μA	233 μA	
NC-RM	500 μA	121 μA	
Enclosure Leakage Current			
OS	500 μA	0 μA	
NC	100 μA	0 μA	
OE	500 μA	121 μA	
OS-RM	500 μA	0 μA	
NC-RM	100 μA	0 μA	
OE-RM	500 μA	121 μA	
Patient Leakage Current AC			
OS, Module : PADDLES, Lead : ALL	500 μA	0 μA	
NC, Module : PADDLES, Lead : ALL	100 μA	0 μA	
OE, Module : PADDLES, Lead : ALL	500 μA	29 μA	
OS-RM, Module : PADDLES, Lead : ALL	500 μA	0 μA	
NC-RM, Module : PADDLES, Lead : ALL	100 μA	0 μA	
OE-RM, Module : PADDLES, Lead : ALL	500 μA	29 μA	

Mains on Applied Parts

SFC, Module : PADDLES, Lead : ALL	5000 μ A	80 μ A
SFC-RM, Module : PADDLES, Lead : ALL	5000 μ A	80 μ A

Patient Leakage Current DC

OS, Module : PADDLES, Lead : ALL	50 μ A	0 μ A
NC, Module : PADDLES, Lead : ALL	10 μ A	0 μ A
OE, Module : PADDLES, Lead : ALL	50 μ A	0 μ A
OS-RM, Module : PADDLES, Lead : ALL	50 μ A	0 μ A
NC-RM, Module : PADDLES, Lead : ALL	10 μ A	0 μ A
OE-RM, Module : PADDLES, Lead : ALL	50 μ A	0 μ A

***** UNIT PASSED TEST! *****

Remark :

baterie 05/2000 - funkční ale stará - doporučena výměna

Signature : _____