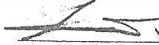


Servisní výkaz č.
843

Technik: Jiří Kořínek

Podpis: 

ALCON Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.

Servisní oddělení

Vinohradská 151, 130 00 Praha 3

Tel.: 225 377 300

Fax: 225 377 305 / 257 211 684

Alcon

Servisní výkaz

Č. objednávky: DIS0700808


Č. zákazníka: 1459

Zákazník: **FN UK Oční klinika**

Adresa: tř. I. P. Pavlova 6 Olomouc

Servis objednal: OZT p. Ludvíková

Dne: 11.5.2007

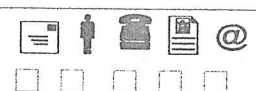Tel/fax/e-mail: 

Přístroj: **Eyelite**

Sériové číslo (sn): 0002204801X

Pedál sn: 6842

Laserový nepřímý oftalmoskop (LIO), inv.č.: 19 212

Instalace: ☐

Demo/
placement: ☐

Záruka: ☐

Zapůjčení přístroje/
příslušenství: ☐

Servisní smlouva: ☐

Katalogové číslo:

Pořadové číslo:

Popis závady / zakázka

Periodická prohlídka

Datum	h	Provedené práce	Celkem 1/2h
18.6.2007	8:00:00	Přístroje byly odkrytovány, vyčištěny od prachu a ost. nečistot. Dále bylo vše prověřeno, zkalibrováno či seřizeno dle standardní servisní procedury STP Alcon (viz. záznam ".....Data Sheet").	4
		PŘÍSTROJE VYHOVĚLY všem předepsaným požadavkům jak z hlediska přesnosti, tak z hlediska bezpečnosti.	0
		Příští PP: 6/2008	0
			0
			0
			0
			0
			0

Časový rozpis servisního výkonu

Údržba,
serv.smlouva

8

1/2h

Oprava,
upgrade

0

1/2h

Funkční test

0

1/2h

Instalace a
zaškolení

0

1/2h

Sazba za 1/2h 0,00

Celkový čas
servisního výkonu

8

Práce celkem

0,00

Časový rozpis cesty

Cesta

20

1/4h

Sazba za 1/4h

0,00

Cestovné celkem

0,00

Náhradní díly ☒

Demo ☐

Zapůjčení přístroje/příslušenství ☐

Vrácení přístroje ☐

Katalogové číslo	Počet	Název	č.Alcon	Instalováno	Vráceno	Fakt.cena
8065163168	1	Periodická prohlídka	106			17 000,00
8065163168	1	Sleva - provedení PP více přístrojů souč.	107			-3 000,00
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					

Materiál celkem

Převzal zástupce fy. Alcon:

14 000,00

K fakturaci celkem bez DPH

14 000,00

Bezpečnostně technická
kontrola

Měřeno přístrojem MEDITEST 50
v.č.: 200181, kal.list.: 0373/1M50

Odpor ochranného

uzemňovacího vodiče

280

mΩ

Izolační odpor větší než

20

MΩ

Unikající proud mezi síťovou
a přístupnou částí

0,34

mA

Unikající proud mezi síťovou
a přílohou částí

0,025

mA


Potvrzujeme provedení servisního výkonu/ převzetí přístroje po opravě:

Hodnocení provedení servisu (zaškrtněte): ☺☐ ☹☐ ☹☐☐

18.6.2007

Datum:

Razítko a podpis zákazníka:

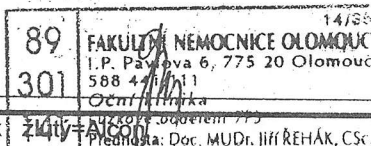

List serv.výkazu: modrý=serv.technik růžový=posílaný s fakturou zelený=zákazník

Ophthalmas Eyelite / Eyelase Green Data Sheet

Customer: Oční klinika FN Olomouc

Service Request No: 843

Model: EyeLite

S/N: 0002204801X

NOTE: Throughout this checklist either fill in the requested data or place a ☒ mark in the bracketed space, ().
Any N/A's must be explained in the notes section of this document.

Test Equipment:

EQUIPMENT	CALIBRATION NUMBER	CALIBRATION DUE DATE
Power Meter	212406-001	11/01/2007
Power Meter Head	222584-001	11/01/2007
Oscilloscope	3024/2005	12/14/2007

Check one of the following: ☒ Preventative Maintenance or
(Complete section 2.1, then proceed to 2.2)

☐ Service Call/Installation/Upgrade
(Start at section 2.2)

2.1. PREVENTATIVE MAINTENANCE

- | | |
|---|---|
| <p>2.1.1 ☐ Slit Lamp Optical Alignment</p> <p>2.1.2 ☒ LIO Optical Alignment</p> <p>2.1.3.3 ☐ Slit Lamp Delivery System Efficiency</p> <p>2.1.3.4 ☒ LIO Delivery System Efficiency</p> <p>2.1.3.5 ☒ Endoprobe Fiber Transmission</p> <p>2.1.3.6 169.920 Number of Shots on Laser</p> | <p>2.1.4.4 ☒ Shutter Closed Safety</p> <p>2.1.4.5 ☒ Shutter Open Safety</p> <p>2.1.4.6 ☒ Shutter Open Safety (on startup)</p> <p>2.1.4.7 ☒ Safety Photocell #3 Safety</p> <p>2.1.4.9 ☒ Fiber Detection Safety</p> |
|---|---|

2.2. SERVICE FUNCTIONAL TEST

- | | |
|--|---|
| <p>2.2.1 ☒ Visual Inspection</p> <p>2.2.2.1 ☐ Slit Lamp Mechanical Check</p> <p>2.2.2.2 ☐ Slit Lamp Optical Check</p> <p>2.2.4.4 ☒ Power</p> <p>2.2.5 ☒ Aiming beam intensity < 1mW</p> <p>2.2.6.1 ☒ Panic Switch Safety</p> <p>2.2.6.2 ☒ Key Switch Safety</p> <p>2.2.6.3 ☒ Fiber Detection Safety</p> <p>2.2.6.4 ☒ Doctors Filter Engage/Disengage Slit Lamp</p> <p>2.2.6.5 ☒ Doctors Filter Engage/Disengage Endoprobe</p> | <p>2.2.6.6 ☒ Remote Interlock Safety</p> <p>2.2.6.7 ☒ Doctors Filter Disconnect Safety</p> <p>2.2.6.8 ☒ Foot switch Disconnect Safety</p> <p>2.2.6.9 ☒ Foot switch depressed Safety</p> <p>2.2.6.10 ☒ Potentiometer Safety</p> <p>2.2.6.11 ☒ Power to minimum Safety</p> <p>2.2.6.12 ☒ Keypad Functionality</p> <p>2.2.6.13 ☒ Keypad button Safety</p> <p>2.2.7 ☒ Final Check</p> |
|--|---|

2.2.3 Ophthalmas 532 Eyelite/Eyelase green Timing Table					
Displayed	0.0085-0.0115s	0.085-0.115s	0.225-0.345s	0.595-0.805s	1.275-1.725s
Actual	0, 0096	0, 100	0, 300	0, 696	1, 520

2.2.4 Ophthalmas 532 Eyelite /Eyelase green Power Table					
Mode	0.0255-0.0345W	0.0425-0.0575W	0.085-0.115W	0.425-0.525W	0.850-1.15W
Slit Lamp					
Endo Probe		0, 53		0, 497	1,032
LIO			0, 930	0,490	0,973

Jir í Koř inek

Test Performed by (PRINT)

18.6.2007

Date

Notes: