

Servisní výkaz č.
1072

Technik: Michal Hruša
Podpis: 

ALCON Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.

Servisní oddělení
Vinohradská 151, 130 00 Praha 3
Tel.: 225 377 300 Fax.: 225 377 305

Alcon
Servisní výkaz

Č. objednávky: DIS0801917 Č. zákazníka: 1459

Fakultní nemocnice Olomouc, Oční klinika

Zákazník: _____

Adresa: I. P. Pavlova 6 Olomouc

Servis objednal: Ivana Ludvíková

Dne: 3.7.2008

Tel/fax/e-mail: ivana.ludvikova@fnol.cz



Přístroj: **EyeLite**

Sériové číslo (sn): 0002204801X

Pedál sn: 6842

Laserový nepřímý oftalmoskop (LIO) inv.č.: 19 212

Instalace: ☐ Demo/ ☐ ☐ ☐ Záruka: ☐ Zapůjčení přístroje/ ☐
placement: příslušenství:

Servisní smlouva: ☐

Katalogové číslo: _____ Pořadové číslo: 0

Popis závady / zakázka

Periodická prohlídka přístroje EyeLite + LIO

Inv. č. I019196-000 + I019212-000

(oční laser + oftalmoskop)

Datum	h	Provedené práce	Celkem 1/2h
		Přístroj prověřen dle standardního postupu firmy ALCON (viz příložený kontrolní list "OPHTHALAS® EyeLite® ...").	5
		Kalibrace monitoru energie. Kontrola příslušenství: nepřímý oftalmoskop (LIO).	1
		PRÍSTROJ VYHOVĚL VŠEM PŘEDEPSANÝM ROZSAHŮM Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A FUNKCE.	
		Příští periodická prohlídka: VII. / 2009.	

Časový rozpis servisního výkonu

Údržba,
serv.smlouva

6

1/2h

Oprava,
upgrade

0

1/2h

Funkční test

0

1/2h

Instalace a
zaškolení

0

1/2h

Sazba za 1/2h 0,00

Celkový čas
servisního výkonu 6

Práce celkem

0,00

Časový rozpis cesty

Cesta

9

1/4h

Sazba za 1/4h

0,00

Cestovné celkem

0,00

Náhradní díly ☐ Demo ☐ Zapůjčení přístroje/příslušenství ☐ Vracení přístroje ☐

Katalogové číslo	Počet	Název	č.Alcon	Instalováno	Vráceno	Fakt.cena
8065163168	1	Periodická prohlídka	106			17 000,00
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					

Materiál celkem

Převzal zástupce fy. Alcon:

17 000,00

K fakturaci celkem bez DPH

17 000,00

Bezpečnostně technická kontrola

Měřeno přístrojem MEDITEST 50
v.č.: 200181, kal.list.: 00265/1M50

Odpor ochranného
uzemňovacího vodiče

140 mΩ

Izolační odpor větší než

20 MΩ

Unikající proud mezi síťovou
a přístupnou částí

0,33 mA

Unikající proud mezi síťovou
a přílohou částí

0,006 mA

Potvrzujeme provedení servisního výkonu/ převzetí přístroje po opravě:

11.7.2008

Datum:

Razítko a podpis zákazníka:

1 list serv.výkazu: modrý=serv.technik růžový=odoslaný s fakturou zelený=zákazník žlutý=Alcon

Ophthalas Eyelite / Eyelase Green Data Sheet

Customer: FN Olomouc, Oční klinika

Service Request No: 1072

Model: EyeLite

S/N: 0002204801X

NOTE: Throughout this checklist either fill in the requested data or place a ☒ mark in the bracketed space, ().
Any N/A's must be explained in the notes section of this document.

Test Equipment:

EQUIPMENT	CALIBRATION NUMBER	CALIBRATION DUE DATE
Power Meter	Ophir Nova II, 02239-OPH-07	10/1/2008
Power Meter Head	30A-SH-V1, 02241-OPH-07	10/1/2008
Oscilloscope	FLUKE 196 B	1/24/2009

Check one of the following: ☒ Preventative Maintenance or
(Complete section 2.1, then proceed to 2.2)

☐ Service Call/Installation/Upgrade
(Start at section 2.2)

2.1. PREVENTATIVE MAINTENANCE

- | | |
|--|--|
| 2.1.1 ☐ Slit Lamp Optical Alignment | 2.1.4.4 ☒ Shutter Closed Safety |
| 2.1.2 ☒ LIO Optical Alignment | 2.1.4.5 ☒ Shutter Open Safety |
| 2.1.3.3 ☐ Slit Lamp Delivery System Efficiency | 2.1.4.6 ☒ Shutter Open Safety (on startup) |
| 2.1.3.4 ☒ LIO Delivery System Efficiency | 2.1.4.7 ☒ Safety Photocell #3 Safety |
| 2.1.3.5 ☒ Endoprobe Fiber Transmission | 2.1.4.9 ☒ Fiber Detection Safety |
| 2.1.3.6 <u>227886</u> Number of Shots on Laser | |

2.2. SERVICE FUNCTIONAL TEST

- | | |
|---|--|
| 2.2.1 ☒ Visual Inspection | 2.2.6.6 ☒ Remote Interlock Safety |
| 2.2.2.1 ☐ Slit Lamp Mechanical Check | 2.2.6.7 ☒ Doctors Filter Disconnect Safety |
| 2.2.2.2 ☐ Slit Lamp Optical Check | 2.2.6.8 ☒ Foot switch Disconnect Safety |
| 2.2.4.4 ☒ Power | 2.2.6.9 ☒ Foot switch depressed Safety |
| 2.2.5 ☒ Aiming beam intensity < 1mW | 2.2.6.10 ☒ Potentiometer Safety |
| 2.2.6.1 ☒ Panic Switch Safety | 2.2.6.11 ☒ Power to minimum Safety |
| 2.2.6.2 ☒ Key Switch Safety | 2.2.6.12 ☒ Keypad Functionality |
| 2.2.6.3 ☒ Fiber Detection Safety | 2.2.6.13 ☒ Keypad button Safety |
| 2.2.6.4 ☒ Doctors Filter Engage/Disengage Slit Lamp | 2.2.7 ☒ Final Check |
| 2.2.6.5 ☒ Doctors Filter Engage/Disengage Endoprobe | |

2.2.3 Ophthalas 532 Eyelite/Eyelase green Timing Table					
Displayed	0.0085-0.0115s	0.085-115s	0.225-0.345s	0.595-0.805s	1.275-1.725s
Actual	---	---	---	---	---

2.2.4 Ophthalas 532 Eyelite/Eyelase green Power Table					
Mode	0.0255-0.0345W	0.0425-0.0575W	0.085-0.115W	0.425-0.575W	0.850-1.15W
Slit Lamp	---	---	---	---	---
Endo Probe	---	0,0520 W	---	0,499 W	0,987 W
LIO	---	---	0,091 W	0,455 W	0,921 W

Ing. Michal HRUDA

Test Performed by (PRINT)

11.7.2008

Date

Notes:

~~Alcon Pharmaceuticals~~

(Czech Republic s.r.o.)

Vinohradská 151

130 00 Praha 3

⑪

IČO: 26427389 DIČ: CZ26427389