

Objednavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
I.P.Pavlova 6
Olomouc
775 20


Předmět a typ: **Telecam SL Pal 20212020**
v.č.: **HKPO 27389**
umístění: **plicní**
datum: **03.08.2006**

Předepsaný úkon				Hodnocení					
■ Vizuální kontrola <ul style="list-style-type: none"> - kryt (CCU, hlava kamery) - označení - identifikační data - síťové pojistky - konektor kabelu kamery - kamerový propojovací kabel - hlava kamery - držák nástrojů - systém čoček 				<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje	<input type="checkbox"/>	poškozený
			<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje	<input type="checkbox"/>	špatně čitelné	
			<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje	<input type="checkbox"/>	špatně čitelné	
			<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovují	<input type="checkbox"/>	nevyhovují			
			<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje	<input type="checkbox"/>	poškozený	
			<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje	<input type="checkbox"/>	poškozený	
			<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje	<input type="checkbox"/>	poškozený	
			<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje	<input type="checkbox"/>	špatně funkční	
■ Funkční kontrola <ul style="list-style-type: none"> - síťový vypínač - kroužek funkce Focus (ostrost obrazu) - kroužek funkce Zoom - tlačítka - Výstupy: video, Y/C, RGB, Sync - reprodukce barev a kvalita obrazu - klávesnice - rychlý návod k obsluze 				<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje		
			<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje	<input type="checkbox"/>	špatně funkční	
			<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje	<input type="checkbox"/>	špatně funkční	
			<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje	<input type="checkbox"/>	bez tlačítek	
			<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje	<input type="checkbox"/>	špatně funkční	
			<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje	<input type="checkbox"/>	zhoršená	
			<input type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje	<input checked="" type="checkbox"/>	bez klávesnice	
			<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	chybí	<input type="checkbox"/>	špatně čitelný	
■ Měření el. bezpečnosti (IEC 601.1)									
- odpor ochranného vodiče		0,09	Ω	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje		
- unikající proud do země:	- N.C.	0,11	mA	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje		
	- S.F.C.	0,12	mA	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje		
- unikající proud krytem:	- N.C.	0,02	mA	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje		
	- S.F.C.	0,02	mA	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje		
- unikající proud pacientem:	- N.C.	0,04	mA	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje		
	- S.F.C.	0,05	mA	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje		
- unikající proud pacientem: (síťové napětí na příložené části)	- S.F.C.	0,07	mA	<input checked="" type="checkbox"/>	vyhovuje	<input type="checkbox"/>	nevyhovuje		

N.C. = normální stav

S.F.C. = stav jedné závady

Celkové hodnocení: Revidované zařízení ~~neplní~~ **splňuje** podmínky pro bezpečný a spolehlivý provoz stanovené výrobcem.

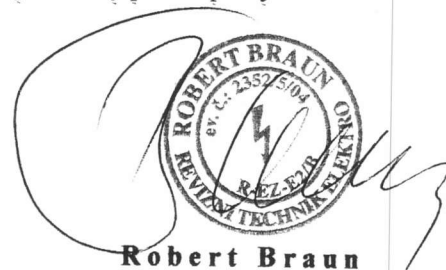

Platnost revize do: 03.08.2007

viz závěr

Robert Braun
autorizovaný servisní technik firmy
KARL STORZ - ENDOSKOPE

