

Medical Systems Management
P.O.Box 120, 261 81 Příbram
Tel.: +42(0) 306 20782
+42(0) 306 20603
Fax.: +42(0) 306 28649

Číslo zakázky: 220V-30001340

Protokol o předání přístroje

Typ přístroje : N 180
Výrobní číslo : 2140 6108
Datum uvedení do provozu : 6. 3. 1994
Umístění přístroje (pracoviště) : FN, stř. Neurologie
Adresa : 44520 Olomouc, I. P. Pavlova 6
Telefon : 068/444 1111
Za kupujícího převzal :
Za prodávajícího předal : J. Milec
Příslušenství : DS 100A (W00185), EC8 (B 111111)

Poznámky :

Záruční lhůta: 12 měsíců, od data uvedení do provozu přisl. 6 měs. + bat.

MSM

MSM, spol. s r.o.
P.O. Box 120, Lhota u Příbramě 13
261 81 Příbram (1)

Za prodávajícího

MUDr. Ivanka Vlachová
89-301-130
100 00098892
FAKULTNÍ NEMOCNICE
V OLMOUCI
Neurologické ústředí

Předávací funkční test

Úkon	Operace	Prvek	Funkce	
1.	Zapnout síť	Síťový vypínač	Indikátor napájení	0
2.	Zapnutí přístroje	ON/OFF	Autotest	0
		Dip Switch 1 OFF	Indikace NEO	0
		Dip Switch 1 ON	Indikac -	0
3.	Zapojit senzor	DS 100 A	SA02 = 0	0
			Puls rate = 0	
4.	Aplikovat senzor	DS 100 A	Senzor aktivován	0
			SA02 = 0	0
			Puls rate = 0	
			Bargraf = indikace	
5.	Alarm HIGH SAT Kontrola tov.nastavení	Ovladač, tlačítko Tlačítko Změna mezí->	SA02=100 (rudá)	0
			Akustický signál	0
			Indikátor High Sat	0
			Hodnota S02->rudá	0
6.	Alarm LOW SAT Kontrola tov.nastavení	Ovladač, tlačítko Tlačítko Změna mezí->	SA02= 85 (rudá)	0
			Akustický signál	0
			Indikátor Low Sat	0
			Hodnota S02->rudá	0
7.	Alarm HIGH RATE Kontrola tov.nastavení	Ovladač, tlačítko Tlačítko Změna mezí->	PULS RATE=140	0
			Akustický signál	0
			Indikátor High Sat	0
			Hodnota S02->rudá	0
8.	Alarm LOW RATE Kontrola tov.nastavení	Ovladač, tlačítko Tlačítko Změna mezí->	PULS RATE= 55	0
			Akustický signál	0
			Indikátor Low Sat	0
			Hodnota S02->rudá	0
9.	Kontrola režimu NEO	Dip Switch 1 OFF	Indikace NEO	0
10.	Alarm HIGH SAT Kontrola tov.nastavení	Ovladač, tlačítko Tlačítko Změna mezí->	SA02= 95 (rudá)	0
			Akustický signál	0
			Indikátor High Sat	0
			Hodnota S02->rudá	0
11.	Alarm LOW SAT Kontrola tov.nastavení	Ovladač, tlačítko Tlačítko Změna mezí->	SA02= 80 (rudá)	0
			Akustický signál	0
			Indikátor Low Sat	0
			Hodnota S02->rudá	0
12.	Alarm HIGH RATE Kontrola tov.nastavení	Ovladač, tlačítko Tlačítko Změna mezí->	PULS RATE=200	0
			Akustický signál	0
			Indikátor High Sat	0
			Hodnota S02->rudá	0
13.	Alarm LOW RATE Kontrola tov.nastavení	Ovladač, tlačítko Tlačítko Změna mezí->	PULS RATE=100	0
			Akustický signál	0
			Indikátor Low Sat	0
			Hodnota S02->rudá	0
14.	Akumulátorový provoz	Vypínač napájení vypnout	Indikátor Prov.na bat.	0