

Martin Bičič - BIČELS, Resslerova 890, 500 02 Hradec Králové

DIČ: CZ6404282192, IČO: 15591051, číslo účtu: 21397/0300

tel. 495 217 192

fax. 495 213 213

Ministerstvo zdravotnictví Č.j.: 6180A/02 - servis, os.pověř.

**PERIODICKÁ BEZPEČNOSTNĚ-TECHNICKÁ KONTROLA INJEKČNÍ PUMPY GRASEBY 3xxx**

<b>Typ přístroje:</b> inj.dávkovač Graseby 3100  II b	<b>Výrobní číslo :</b> 36509  <b>Invent. číslo:</b> I017961-000  <b>ID:</b>	<b>Uživatel:</b> Fakultní nemocnice Olomouc dispečink oprav I.P.Pavlova 6 77520 OLOMOUC <b>Oddělení:</b> Neurologická klinika JIP
---	---	---

Bezpečnostně-technická prohlídka je prováděna v souladu s návodem k použití a servisním návodem.

Použity výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje.

Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Přísluř. a dokumentace musí být uvedena ve zkušebním protokolu.

Prohlídka musí být prováděna každých:

**12 měsíců**

**Zkušební příslušenství**

Manometr CRESSTO DMU-R1000 v.č.2842/06 - Snímač byl porovnán s měřidlem CRESSTO s.r.o., ev.č. P262, návaznost na etalon ČMI zajištěna prostřednictvím AKL ČEZ Dukovany(C245), REVEX R2051 v.č. 0401174 a RM 2050 v.č. 4030008 přístroj ke kontrole elektr. spotřeb. - kalibrační list č. R2051/1307 a RM2050/044/M, Měřicí přípravek 0131-0230 , Kalibrační přípravek 0 - 2,0 bar-CERTIFICATE OF CONFORMITY : CC-067000-Rév.2

**Kontrola vizuální**

Kontrolovat	Poznámky	Zjištěné závady	Potvrzení
Kryty, konektory, snímač typu stříkačky snímač založení pístu stříkačky, síť.kabel, čistota, značení, příslušenství			ano

**Kontrola indikace**

Operační a alarmové akustické indikátory			ano
--	--	--	-----

**Test založení stříkačky**

Kontrola uzavření palce (8-10mm)			ano
Simulace a reakce na vyvoditelné alarmy			ano

**Test snímače pístu stříkačky**

Simulace a reakce na vyvoditelné alarmy			ano
---	--	--	-----

**Test alarmu + indikace**

Předzvěst konce dávky			ano
Konec dávky			
Okluzní tlak			
Stříkačka			
Akumulátor			

**Test okluzního tlaku**

Alarm occlusion (60-75 kPa / 3,6-4,1 kg)		4 kPa / kg
---	--	------------

**Test přesnosti dávky**

Rychlost 99,9 ml/h - 6 min (17,7-18,3mm)		17,75 mm
Test funkce bolus (dle modelu) Graseby 3100		nemá

**Test napájení**

Indikace síť/akumulátor a předzvěst alarmu			ano
Kapacita akumulátoru			ano

**Zkouška elektrické bezpečnosti dle ČSN EN 60601**

Napájecí napětí: 230 V		
Unikající proud : 0,007 mA	Izolační odpor: >20 MΩ	

**9. Výsledek kontroly**

Zařízení je schopno bezpečného provozu: **ANO**  
Pokud NE - důvod:

**Výše uvedený zdravotnický prostředek splňuje ustanovení §27, 28 a 52, zákona č.123/2000Sb.**

Datum příští kontroly:  <b>9/2009</b>	Kontrolu provedl: R.Vejvoda Datum : 11.9.2008 Podpis : Resslerova 890 500 02 HRADEC KRÁLOV tel. 495 217 094 fax 495 217 191 DIČ CZ6404282192 IČO 15591051	Přístroj předán: Datum: Podpis :
---	--	--