

PROTOKOL O BEZPEČNOSTNÍ TECHNICKÉ PROHLÍDCE ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

podle zákona 123/2000 Sb., v platném znění, § 27,28

Přístroj: VASOTRAIN	Typ: 447
Výrobní číslo: 07/009	Inventární číslo: C000010-000
Výrobce: ENRAF/NONIUS	Zdravotnický prostředek třídy: II.b
Poskytovatel zdravotní péče: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc – Klinika pracovního lékařství odd. 43	

	naměřená hodnota	vyhovuje	
		ANO	NE
1. kontrola poškození krytů	---	☒	☐
2. kontrola napájecí části včetně síťového přívodu	---	☒	☐
3. kontrola utěšňovacích manžet a jejich tlakování, těsnost ventilku	---	☒	☐
4. kontrola vnitřních měřidel přístroje	---	☒	☐
5. kontrola stavu mechanických částí	---	☒	☐
6. kontrola stavu elektrického propojení	---	☒	☐
7. kontrola charakteristik výstupních podtlaků a přetlaků	---	☒	☐
7. kontrola intenzity výstupního přetlaku při nastavení(100 Pa)	98 Pa	☒	☐
8. kontrola intenzity výstupního podtlaku při nastavení(-100 Pa)	- 105 Pa	☒	☐
9. funkční kontrola	---	☒	☐
Kontrola elektrické bezpečnosti přístrojem <u>MEDITEST 50</u> v.č. 205 007, kalibrace platná do: 1. 2. 2009			
10. unikající proud příložná část	0,001 mA	☒	☐
11. unikající proud krytem (NP ≤ 0,1mA; JZ ≤ 0,5 mA)	0,06 mA	☒	☐
12. izolační odpor (> 20MΩ)	≥ 20 MΩ	☒	☐
13. odpor zemnicího vodiče (≤ 0,3 Ω)	0,02 Ω	☒	☐

Stav zdravotnického prostředku:

Zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům a dokumentaci podle které byl vyroben, splňuje určený účel použití a je schopen bezpečného provozu.

Termín následného prověření stavu zdravotnického prostředku: 7. 12. 2008

Ověření provedl: Jaroslav Měchura, tel: 603 338 678

Jaroslav Měchura

**SERVIS A PRODEJ
ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY**

Sídlíště Klínky 2458/63, 697 01 Kyjov
tel./fax: 518 614 204, mobil: 603 338 678
IČO: 75770342, DIČ: CZ7607074343

Dne: 7. 12. 2007 razítko a podpis: