

N A P A R O V A Č T V Á R E III

Je určený na uvoľňovanie pokožky tváre pred kozmetickými úkonmi. Pokožku tváre zvlhčuje a vyhrieva vlhká para v dýchateľnej atmosfére kukly, obohatenej vôňou, dezinfekčným a osviežujúcim účinkom liečivých bylín /harmanček, lípa, materina dúška/, prípadne nálevov. Docielime zmäknutie, vyhriatie a osvieženie pokožky tváre. Pri dodržaní hygienických požiadaviek je prístroj vhodný tiež na krátkodobé inhalácie horných dýchacích ciest liečivými bylinami a nálevmi.

Naparovač sa skladá z napar. kukly, ohrievacej nádoby, nádrže a el. časti. Nádrž a ohriev. nádoba je z nehrdzavejúcej ocele. V nádrže /obsah 1dm³/ sú zabudované sondy na snímanie min. stavu hladiny pre indikáciu a ochranu výhrevného telesa. Destilovaná voda tečie z nádrže do ohriev. nádoby, kde je uvedená do varu. Para je výtokovou rúrkou odvádzaná do kukly prúdením cez sitko s liečivými bylinami. Pomocný prúd pary je vedený na tepelné čidlo - termistor, ktorý slúži na stabilizáciu teploty v kukle a po znížení hladiny vody v nádrži pod dovolenú medzu signalizuje červenou LED diodou potrebu doliatia vody, inak pri ďalšom poklese hladiny samočinne vypne ohrev vody. Po doliatí vody /0,2 až 0,8 dm³/ sa ohrev vody automat. zapne. Dávkovanie pary je možné regulovať v malom rozsahu potenciometrom. Bezpečnú funkciu prístroja zabezpečuje ochrana oddelením obvodov podľa ČSN 34 1010, preto prístroj je nerozoberateľne /elektr. pevne/ spojený s oddeľovacím transformátorom. Hlavný vypínač, potenciometer a signal. LED diody sú na bočnom paneli. Ochranná poistka je na vnútornej strane panelu.

Návod na obsluhu a údržbu:

Prístroj udržiavame v čistom stave.

Doplníme vodu do nádrže až po okraj plniaceho otvoru.

Do sitka na výtokovej rúrke nasypeme zvolené byliny.

Šnúru hl. el. prívodu do oddel. traťa zapojíme do siete 220/220 V

Zapneme hl. vypínača paneli prístroja - svieti zelená LED dioda.

Ohrev signalizuje dioda žltá. Zo studeného stavu na prevádzkovú teplotu je čas ohrevu 5-7 minút, pri ďalšom zapnutí je doba minimálna.

Množstvo pary a teplotu v kukle nastavíme potenciometrom. Voda skondenovaná na vnút. stene kukly je odvádzaná do nádrže.

Pri odstavení prístroja na dlhšiu dobu musí zostať hlavný vypínač vypnutý!

Vnútorný priestor kukly utrieme mäkkou utierkou dosucha, použité byliny vysypeme a sitko s nádobkou umyjeme. Sporadicky podľa znečistenia je nutné zvýšnú vodu z nádrže a ohriev. nádoby vyliat a tieto vyplachnúť. Prívod vody prečistiť a skontrolovať na tesnosť.

Technické údaje:

Napájacie napätie : 220 V, 50Hz
 Menovitý príkon : 510 VA
 Istenie : tavnou poistkou F4A
 Náplň : destilovaná voda
 Rozmery : 500 x 230 x 350 mm
 Hmotnosť : 5 kg
 Krytie : IP 31

Príslušenstvo:

Bezpečnostný oddeľovací transformátor 220/220 V - 800 W

Náhradné diely dodané s výrobkom:

Poistka F 4A - 1 ks
 Poistka F 6,3A - 1 ks
 Výhrevné teleso - 2 ks

Ďalšie náhradné diely:

Termistor 13NR15
 Výhrevné teleso v.č. 4-0452
 Doska elektroniky zostavená 4-0063-E
 Potravinárska hadička $\phi 7/\phi 4-185$
 Kukla napařovača 1-0057/B
 Krytka /sitko/ 3-0300
~~háčik~~ 3-0334

Výrobné číslo: 068

Odkúšanie prístroja nepretržitou prevádzkou po dobu 2 hodín:

dátum ... 27. 2. 1989

razítko, podpis