

# IMPULSNÍ SVAŘOVAČKA SIGNUM ROLL

s regulací teploty

Uživatelský manuál

IMPULSNÍ SVAŘOVAČKA

IMPULSNÍ SVAŘOVAČKA

IMPULSNÍ SVAŘOVAČKA

Výběr příslušenství: Impulsní svařovačka je vybavena širokou škálou příslušenství, které umožňuje svařování různých materiálů a tloušťek. Všechny příslušenství jsou uvedeny v seznamu příslušenství v kapitole 4.1.

Impulsní svařovačka je vybavena širokou škálou příslušenství, které umožňuje svařování různých materiálů a tloušťek. Všechny příslušenství jsou uvedeny v seznamu příslušenství v kapitole 4.1.

Všechny příslušenství jsou uvedeny v seznamu příslušenství v kapitole 4.1.

Impulsní svařovačka je vybavena širokou škálou příslušenství, které umožňuje svařování různých materiálů a tloušťek. Všechny příslušenství jsou uvedeny v seznamu příslušenství v kapitole 4.1.

Impulsní svařovačka je vybavena širokou škálou příslušenství, které umožňuje svařování různých materiálů a tloušťek. Všechny příslušenství jsou uvedeny v seznamu příslušenství v kapitole 4.1.

## DODAVATEL

**CZECH – ELMED** spol. s r.o.

Zarámí 4432

tel. : 067 / 721 1987 , 424 79

tel,fax. : 067 / 845 418 , 424 79

IČO: 25502581

DIČ: 320-25502581

760 01 **ZLÍN**



Vážení zákazníci,

Děkujeme Vám za výběr přístroje firmy DENTAL X s.r.l. Doporučujeme Vám, aby jste si pečlivě prostudovali tento návod k obsluze a respektovali všechna doporučení v něm uvedená.

**Upozornění!** Na odstranění závad způsobených neodbornou obsluhou či zásahem ze strany uživatele v době záruky nelze vztáhnout podmínky záručních oprav.

Stále se zvyšující požadavky na přípravu sterilního materiálu pro pracoviště zdravotnického charakteru postavily jednoznačně na první stupeň žebříčku kvality a jistoty pro sterilizaci v ambulantních zařízeních balení materiálů do jednorázových obalů.

Tento způsob přípravy materiálu je nejen rychlý, bezpečný, ale i ekonomicky výhodný.

Pro rychlé, jednoduché a přitom stoprocentně kvalitní uzavírání jednorázových obalů Vám nabízíme impulsní svařovačku Signum Roll italské firmy DENTAL X, s.r.l.

CZECH-ELMED spol. s r.o.

#### Instrukce pro instalaci a použití:

Vybalte přístroj. Umístěte sterilizační role na držák rolí a zasuňte do štěrbin pod svařovací lištu.

Zapojte svařovačku do zásuvky 230 V pomocí přiložené šňůry.

Zapněte přístroj spínačem umístěným na zadní části přístroje. Zelené výstražné světlo (☑) signalizuje, že je přístroj zapnutý.

Vsuňte obal mezi krycí a posuvnou lištu. Vysuňte potřebnou délku obalu (transparentní strana je směrem nahoru).

Navolte stupeň teploty svařování vpravo na čelní straně. Při zapnutí přístroje je stupeň teploty svařování (⬇) na hodnotě '5' – indikované červeně svítící číslicí. Mačkáním tlačítka prstem se může teplota svařování pohybovat od 160°C stupeň 1 po 180°C stupeň 8. (☑)

Uchopte páku umístěnou na pravé straně přístroje a stlačte směrem dolů.

Při sklopení páky na maximum začne blikat zelené (☑) světlo, které indikuje fázi svařování.

V této poloze můžete odříznout materiál pomocí nože umístěného na pohyblivé čelisti přístroje tak, že jej stlačíte a pohybujete jím ve směru nalevo nebo napravo.

Ukončení fáze svařování je signalizováno žlutým (☑) výstražným světlem a zvukovou signalizací.

Můžeme zvednout páku a vyjmout svařený materiál.

Žluté světlo (☑) svítí po ukončení sváru ještě asi 5 sec, což je nezbytná doba pro vyrovnání teploty – v této době není svařování možné.

Mimoto, jestliže přístroj po určitou dobu svařuje při střední-vysoké teplotě, při rychlém nastavení teploty na minimum se rozsvítí žluté světlo (☑), protože přístroj má vyšší teplotu než je nastavená.

Několik sekund je nutné počkat, než dojde k ochlazení a zhasnutí žlutého světla (☑).



**Instrukce pro přemístování:**

Odpojte síťový kabel – uchopte přístroj rukama na straně páky a na straně opačné, zvedněte a přemístěte na požadované místo.

**Instrukce pro čištění:**

Odpojte síťový kabel a očistěte povrch přístroje mírně navlhčeným hadříkem ve vodě.

**Rozsah použití přístroje:**

Materiály z : papíru  
polypropylenu  
polyamidu  
polyethylenu

**Prodej:** CZECH-ELMED spol. s r.o.

760 01 Zlín , Zarámí 4432

067/ 721 1987, 845 418

*člen Asociace prodejců a výrobců v České republice*

**záruční doba - 6 měsíců**

**Servis :** Hašpica Stanislav, Malenovice, Milíčova 708, Zlín,

Tel.: 0603 444 362



**Instrukce pro přemísťování:**

Odpojte síťový kabel – uchopte přístroj rukama na straně páky a na straně opačné, zvedněte a přemísťete na požadované místo.

**Instrukce pro čištění:**

Odpojte síťový kabel a očistěte povrch přístroje mírně navlhčeným hadříkem ve vodě.

**Rozsah použití přístroje:**

Materiály z : papíru  
polypropylenu  
polyamidu  
polyethylenu

**Prodej: CZECH-ELMED spol. s r.o.**

760 01 Zlín, Zarámí 4432

067/ 721 1987, 845 418

*člen Asociace prodejců a výrobců v České republice*

**záruční doba - 6 měsíců**

**Servis : Hašpica Stanislav, Malenovice, Milíčova 708, Zlín,**

**Tel.: 0603 444 362**

Vážení zákazníci,

Děkujeme Vám za výběr přístroje firmy DENTAL X s.r.l. Doporučujeme Vám, aby jste si pečlivě prostudovali tento návod k obsluze a respektovali všechna doporučení v něm uvedená.

**Upozornění!** Na odstranění závad způsobených neodbornou obsluhou či zásahem ze strany uživatele v době záruky nelze vztáhnout podmínky záručních oprav.

Stále se zvyšující požadavky na přípravu sterilního materiálu pro pracoviště zdravotnického charakteru postavily jednoznačně na první stupeň žebříčku kvality a jistoty pro sterilizaci v ambulantních zařízeních balení materiálů do jednorázových obalů.

Tento způsob přípravy materiálu je nejen rychlý, bezpečný, ale i ekonomicky výhodný.

Pro rychlé, jednoduché a přitom stoprocentně kvalitní uzavírání jednorázových obalů Vám nabízíme impulsní svařovačku Signum Roll italské firmy DENTAL X, s.r.l.

CZECH-ELMED spol. s r.o.

#### Instrukce pro instalaci a použití:

Vybalte přístroj. Umístěte sterilizační role na držák rolí a zasuňte do šterbiny pod svařovací lištu.

Zapojte svařovačku do zásuvky 230 V pomocí přiložené šňůry.

Zapněte přístroj spínačem umístěným na zadní části přístroje. Zelené výstražné světlo (☑) signalizuje, že je přístroj zapnutý.

Vsuňte obal mezi krycí a posuvnou lištu. Vysuňte potřebnou délku obalu (transparentní strana je směrem nahoru).

Navolte stupeň teploty svařování vpravo na čelní straně. Při zapnutí přístroje je stupeň teploty svařování (D) na hodnotě '5' – indikované červeně svítící číslicí. Mačkáním tlačítka prstem se může teplota svařování pohybovat od 160°C stupeň 1 po 180°C stupeň 8. (☑)

Uchopte páku umístěnou na pravé straně přístroje a stlačte směrem dolů.

Při sklopení páky na maximum začne blikat zelené (☑) světlo, které indikuje fázi svařování.

V této poloze můžete odříznout materiál pomocí nože umístěného na pohyblivé čelisti přístroje tak, že jej stlačíte a pohybujete jím ve směru nalevo nebo napravo.

Ukončení fáze svařování je signalizováno žlutým (☑) výstražným světlem a zvukovou signalizací.

Můžeme zvednout páku a vyjmout svařený materiál.

Žluté světlo (☑) svítí po ukončení sváru ještě asi 5 sec, což je nezbytná doba pro vyrovnání teploty – v této době není svařování možné.

Mimoto, jestliže přístroj po určitou dobu svařuje při střední-vysoké teplotě, při rychlém nastavení teploty na minimum se rozsvítí žluté světlo (☑), protože přístroj má vyšší teplotu než je nastavená.

Několik sekund je nutné počkat, než dojde k ochlazení a zhasnutí žlutého světla (☑).