

Na čelní stěně přístroje vlevo nahoře je knoflík zap. el. síť. Vlevo dole je časový regulátor - nastavujeme dobu prac. procesu. Uprostřed je manometr, ručička nám ukáže velikost tlaku vzduchu z centrálního kompresoru. Vpravo je volně nastavitelný ukazatel teploty vody v polymerátoru a pod ním světelná kontrolka. Do polymerátoru vložíme na stojánku protet. práci, napustíme destil.vodu, tak aby výrobek byl zcela ponořen. Potom uzavřeme bezpečně poklop polymerátoru pák. uzávěrem. Nastavíme teplotu polymerace - pohybuje se červená ručička. Po zapnutí el. sítě se přístroj natlakuje a začne se ohřívat dest. voda. Až je na teplotním ukazateli shodně černá ručička s červenou, pak se automaticky spíná čas. prac. procesu. Po jeho dokončení se z přístroje vypustí zadním ventilem natlakovaný vzduch a přístroj začne vypouštět vodu do připraveného kanystru. Potom teprve můžeme přístroj otevřít a vyjmout stojánek s protet. prací. Přístroj udržujeme v čistotě, případné nečistoty odstraňujeme vlhkým klůckem. Do přístroje používáme pouze destilovanou vodu, zamezíme usazování vodního kamene uvnitř přístroje i ve výpustném ventilu.