

WAXELECTRIC II - ELEKTRICÝ NŮŽ

EL. nůž je přístroj pro zubní techniky, umožňuje nahřátí vosku ve stejné teplotě bez přepalování, / změna krystal.struktury vosku /
Po zapnutí přístroje do el. sítě, zmáčkne na čelním panelu - vlevo nahoře, senzor. spínač I/O.

Rozsvítí se pravý a levý display °C.

Pod každým displayem jsou senzor. spínače pro zvýšení nebo snížení provozní teploty. - , + / Pro každý nůž zvlášť /

Přístroj má dva el. nože s vyměnitelnými nastavci, / můžeme s nimi pracovat současně, nebo s každým zvlášť - o stejné nebo rozdílné provoz. teplotě /

Po ukončení práce nože očistíme, vložíme do stojánku a přístroj vypínáme opět senzor. spínačem I/O. Nakonec odpojíme od el. sítě.