


ØŘEZÁVAČ SÁDROVÝCH MODELŮ

typ : 0 – 280

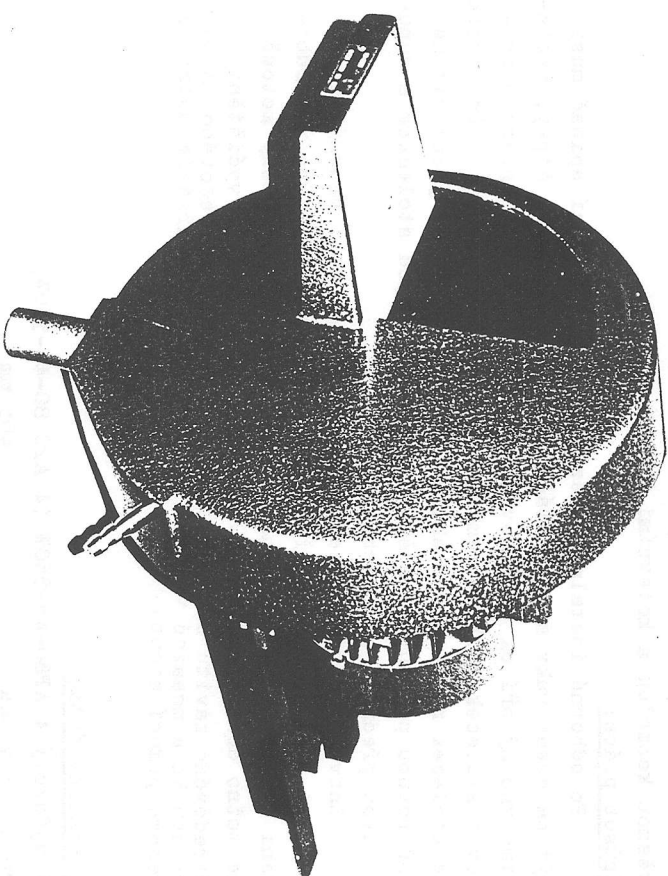

TRYSTOM

PŘÍSTROJOVÁ
A ZDRAVOTNICKÁ
TECHNIKA
spol. s.r.o.

tř. 17. listopadu 50, 772 00 OLOMOUČ
Tel. / fax 068 / 5225262

CZECH REPUBLIC

Přístroj slouží k obroušování sádrových modelů a odlitek ve stomatologické laboratoři - za mokra.

Připojuje se na elektrickou síť 3 x 380V stř. (220V stř.), přívod oplachové vody a odpad vody. Instalaci je vhodné provést dle dodaného situačního plánu. Ořezávač je dodávám s přípevnou konzolkou, kterou je potřeba dle plánu zazdít, nebo se závěsnou konzolou a kotevními šrouby.

Způsob práce:

Po odborné instalaci ořezávače, kdy ovládací spínač musí být na dosah ruky a směr otáčení kotouče ve směru šípky, nastavíme vhodný přítok oplachové vody. Sádrový model opřeme o pracovní stoleček a obroušujeme jej na pracovním kotouči. Od výrobce je stoleček nastaven se sklonem 8°. Je možno jej přestavit na vodorovnou polohu při odšroubování matice pod stolečkem a sundání dvou předních opěrných hrotů.

Znovu upevněný stoleček má mít mezeru mezi brusným kotoučem asi 2 mm. Demontáž ořezávače je možno provést po vyšroubování 4 šroubů M 6 na zadní přírubě. Následně i brusný kotouč je možno demontovat (např. z důvodu renovace) po vyčištění středového závitu od vosku a po vyšroubování středového imbusového šroubu M6 a mosazné vložky. Stažení kotouče z hřídele motoru provedeme pomocí šroubu M 16.

Technická data:

trojfázový 4 AP80-4s-550W (4 APC 80-4s-550W)

rozměry: výška 405 mm

šířka 350 mm

hloubka 410 mm

celková hmotnost s konzolou 23 kg

průměr brusného kotouče 300 mm

pracovní otáčky kotouče 1450 ot/min

koncovka přívodu vody

pro tlakovou hadici Ø 10

koncovka odpadu Ø 34

Příslušenství:

výkres situování a instalace ořezávače

Poznámka: 1. Na zvláštní přání dodává výrobce ořezávač s motorem na 220V stř. (údaje v závorce).

2. Renovace kotoučů provádí výrobce.

3. Na zvláštní přání dodává výrobce ořezávač se závěsnou konzolou a kotevními šrouby pro zavrtání do stěny nebo s konzolou pro připevnění k pracovnímu stolu.

Výrobce zajišťující záruční i pozáruční servis:


TRYSTOM

PŘÍSTROJOVÁ
A ZDRAVOTNICKÁ
spol. s.r.o. TECHNICKÁ

tr. 17. listopadu 50, 772 00 OLOMOUC
Tel. / fax 068 / 5225262

CZECH REPUBLIC

PROPELOVÝ MOTOROVÝ JISTIČ
VZDUCHOVÝ TYP 6170 - 002 / 66
(PŘÍPĚVNÍ NA HMOŽDINKY 4 6)
PŘÍVOD TLAKOVÉ VODY S UZAVÍRA -
CÍM VENTILEM A NÁTRUBKEM
3/8" PRO HADICI

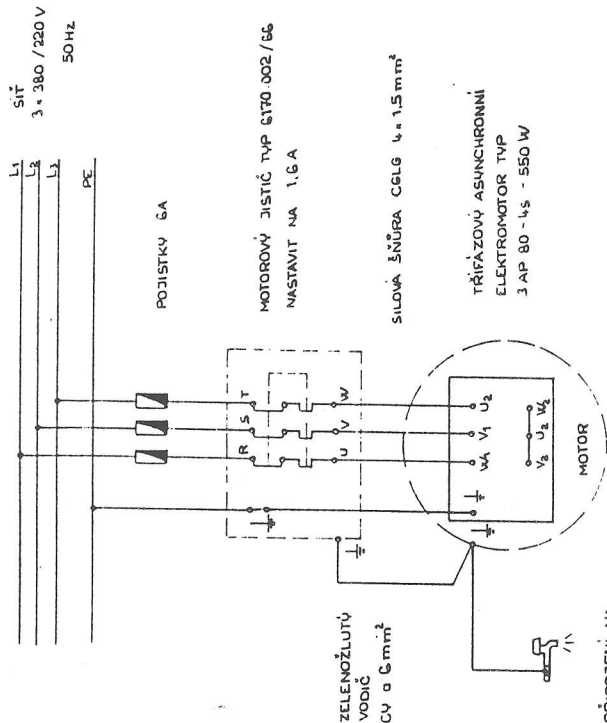

POZNÁMKA:

1. MOTOROVÝ JISTIČ SE MUSÍ UMÍSTIT NA DOSAH Z MÍSTA OBSLUHY VIZ. NÁČRTEK SITUACIÍ OŘEZÁVCE
PROTÍŽE SE PŘÍ PŘÁČI POUŽÍVA VODA, MUSÍ SE K ZÁKLADNÍ OCHRANĚ PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM PROVÉST JEŠTĚ OCHRANA DOPLŇKOVÁ, ABY SE DOSÁHLO POULIČENÍ 30.1010 ZVÝŠENÉ OCHRANY, VE SCHEMATU JE ZAHRAJESLENA DOPLŇKOVÁ OCHRANA POSPOJOVANIM
2. FÁZE ORIENTOVAT DLE VZNAŠENÉHO SMYSLU OTÁČENÍ KOTOUČE

**SITUOVANI ŮŘEŤAVCE SADRŮVÝCH MODELŮ
VZHLÉDEM K NORMALIZOVANÉMU OSAZENÍ
JEDNODILNÉHO DŘEZU A JEHO ELEKTRICKÁ
INSTALACE**