

MULTIMAT MACH 2

1/ napalování keramiky na kovový povrch – kapničku (Carat – keramika)

2/ glazura

Na čelním panelu keramické pece Multimatch 2 je umístěn obdélníkový display, pod ním uprostřed jsou tlačítka pro jednotlivé programy, vlevo dole je umístěn zelený a žlutý spínač.

Po zvolení určitého programu se na display zobrazí: čas pro vypalování keramiky a °C (zároveň se rozsvítí na malém display číslo zvoleného programu)

Po ukončení pracovní fáze zazní akustický signál.

Zelený spínač: EIN / AUS - zapnutí a vypnutí celého přístroje – rozsvítí se zelená kontrolka

Žlutý spínač: Start/ Stop – pro začátek operace - po zvolení čísla programu – rozsvítí se žlutá kontrolka

tlačítko R – po zamáčknutí tlačítka můžeme teprve volit vlastní číslo programu

Čísla jednotlivých programů: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,

70 – opaque

71 – hlavní pálení

72 – pálení glazury

Zubní technik umístí svoji práci připravenou k pálení keramiky v peci Multimatch 2 na keramickou podložku na níž jsou umístěny vyjímatelné keramické hroty konického tvaru, nebo vyjímatelná drátěná pérka. (dle potřeby se mohou rozmístit)

Keramickou podložku s prací (např. korunku) umístíme na kruhovou šamotovou bazi, zvolíme příslušný program – číslo, keramická pec sjede dolů, zmáčkne start, na display se znázorní čas pálení keramiky a °C. Keramická hmota se vypaluje ve vakuu. Po ukončení programu zazní akustický signál, keramická pec stoupá vzhůru, nyní můžeme keramickou podložku s prací sejmut z šamotové baze pece pomocí velké pinzety (práce je ještě horká – necháváme postupně vychladnout). Postupně zubní technik volí následné programy.