

VIBRÁTOR VELKÝ

Vibrátor je určen do protetické zubní laboratoř, kde slouží k dokonalému zalití zatmelovacích hmot.

Horní vibrační plocha, opatřená vrstvou silikonové gumy, umožňuje dostatečně velký prac. prostor.

Na čelní straně vibrátoru je umístěn / vlevo / spínač, který zapneme do polohy I - přístroj je připraven k provozu.

Na čelní straně / vpravo / je umístěn regulátor intenzity vibrací.

Pootočením tohoto knoflíku zvyšujeme nebo naopak snižujeme vibrace.

Po skončení práce přístroj vypínáme v opačném pořadí.

Vibrační plochu přístroje utíráme vlhkým klůckem, předejdeme tak zatvrdnutí ukápnuté hmoty, kterou jinak musíme očistit špachtlí.