



Schnellfrequenz-Motor
NHF 5000®

Highfrequency Motor
NHF 5000®

Hautefrequency Moteur
NHF 5000® Made in Switzerland

Anwendung

Application


Utilisation

Uvedení mikromotoru do provozu

- Stoliň přístroj
- Síťovou zástrčku zasuňte do zásuvné krabice.
- Zástrčku motorového kabelu zasuňte do zásuvky na přední straně přístroje (bajonetový uzávěr).
- Pracovní rukojeť položte na podložku, která je v dodávce.
- Zástrčku od nožního, který je v dodávce, zasuňte do zásuvky na zadní straně přístroje.
- Síťový spínač na čelní straně přístroje zapněte (rozsvítí se kontrolní žárovka). Síťovým spínačem se přístroj i vypíná.
- Volič otáček nastavte po 5 000 otáčkách na žádanou hodnotu, použitím nožního spínače se motor zapíná a vypíná.
- Kolenní a nožní přístroj
- Uvedení do provozu podobně jako u stoliň přístroje.
- V kolenním provedení nastavte volič otáček na žádaný počet otáček, stisknutím kolenové destičky se může plynule dosáhnout nastaveného počtu otáček.
- V nožním provedení se obsluhování nožní páky může plynule regulovat počet otáček od 1 000/min. do 50 000/min.


NHF-NOUMAT 5000 No. 1202

Knieanlasser · Knee control · Genou regulateur

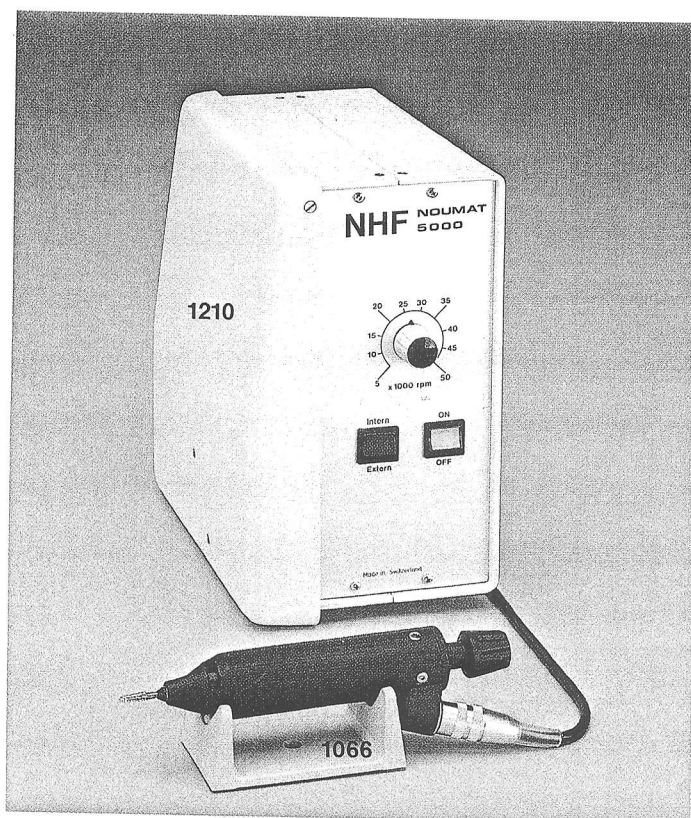

NHF-NOUMAT 5000 digital No. 1204

ohne/without/sans digital No. 1200

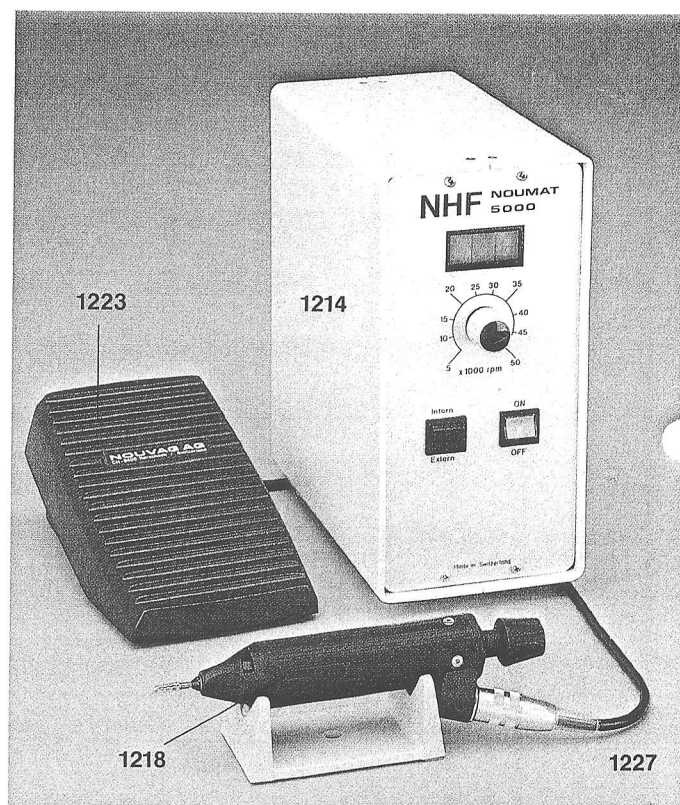

Technische Daten

Drehzahl: 5 000 - 50 000 U.p.m.
Watt: 200
Volt: 110 / 220 - 240 ~
Hz: 50 / 60
Spannzangen: Ø 2,35 mm
auswechselbar Ø 3,00 / 3,175 mm
Masse: 235 x 235 x 100 mm
Gewicht: 6,2 kg

Technical data

Speed: 5 000 - 50 000 r.p.m.
watts: 200
voltage: 110 / 220-240 ~
Hz: 50 / 60
Chucks: Ø 2,35 mm
interchangeable Ø 3,00 / 3,175 mm
Dimension: 235 x 235 x 100 mm
Weight: 6,2 kg

Indications techniques

Vitesse: 5 000 - 50 000 tr./min.
Watts: 200
Volts: 110 / 220-240 ~
Hz: 50 / 60
Pincés: Ø 2,35 mm
échangeables: Ø 3,00 / 3,175 mm
Dimensions: 235 x 235 x 100 mm
Poids: 6,2 kg