

PIEZOELEKTRONICKÝ KAHAN BLAZER

Tento piezoelektronický kahan slouží v zub. laboratoři k bodovému letování kanyl a orto. kroužků.

Vlastní nádoba kahanu je plněna plynem / butan / dnem, dle návodu.

Zážeh kahanu:

vlevo nahoře povolíme šroubový regulátor / open /, z trysky začne unikat plyn, kahan zažehneme stiskem kovového spínače.

Intenzitu plamene korigujeme šroubovým regulátorem.

/ plamen má 4 zóny: OXIDAČNÍ, OXIDAČNĚ REDUKČNÍ, REDUKČNÍ, VNITŘNÍ /

Vlastní letování provádíme oxidačně redukčním plamenem modré barvy.

Pozor na spálení, plamen dosahuje intenzity 1300°C.

Po ukončení letování ihned vypínáme plamen šroubovým regulátorem

/ je zamezen přívod plynu /, předejdeme zranění, škodám na majetku a plýtvání plynu.