

## Návod na obsluhu horkovzdušného sterilizátoru

### HS 122 A

Dveře přístroje se otevírají po uvolnění západky závěru (odtlačení doprava).  
Předměty určené ke sterilizaci musí být uloženy volně na síta tak, aby asi jedna třetina otvorů v sítěch zůstala volná.

Při sterilizaci materiálu postupujeme takto:

- materiál určený ke sterilizaci rozmístíme na síta
- vložíme kontrolní test (indikátor)
- uzavřeme dveře
- nastavíme požadovanou teplotu na regulátoru
- nastavíme požadovaný čas sterilizace
- zkontrolujeme je-li nastavení větrání v uzavřené poloze
- hlavní ovladač otočíme do polohy „I“
- pro předčasné vypnutí ovladač otočíme do polohy „0“

Po samovolném vychladnutí přístroje je možno materiál vyjmout z pracovního prostoru