

**PROTOKOL O BEZPEČNOSTNÍ TECHNICKÉ PROHLÍDCE
ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU**

podle zákona 123/2000 Sb., v platném znění §27,28

Přístroj elektroléčebný: ENDOMED	Typ: 581
Výrobní číslo: 01002	Inventární číslo: C001892-001
Výrobce: ENRAF/NONIUS	Zdravotnický prostředek třídy: II.b
Poskytovatel zdravotní péče: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC klinika TVL - ambulance I. P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC	

	naměřená hodnota	vyhovuje ANO NE	
1. kontrola poškození krytů	---	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. kontrola napájecí části včetně síťového přívodu	---	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. kontrola patientských kabelů, elektrod a návrků	---	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. kontrola vnitřních měřidel přístroje	---	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. kontrola stavu mechanických částí	---	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. kontrola stavu elektrického propojení	---	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. kontrola charakteristik výstupních proudů	---	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. kontrola intenzity výstupního proudu při nastavení(5 mA)	4,82 mA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. kontrola intenzity výstupního proudu při nastavení(20 mA)	19,72 mA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. funkční kontrola	---	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola elektrické bezpečnosti přístrojem MEDITEST 50 v.č. 205 007, kalibrace platná do: 1. 2. 2009			
10. unikající proud příložná část	0,006 mA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. unikající proud krytem (NP ≤ 0,1mA; JZ ≤ 0,5 mA)	0,07 mA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. izolační odpor (> 20MΩ)	>20 MΩ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. odpor zemního vodiče (≤ 0,3 Ω)	0,07 Ω	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stav zdravotnického prostředku:

Zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům a dokumentaci podle které byl vyroben, splňuje určený účel použití a je schopen bezpečného provozu.

Termín následného prověření stavu zdravotnického prostředku: 3. 4. 2009

Ověření provedl: Jaroslav Měchura, tel: 603 338 678

Jaroslav Měchura
**SERVIS A PRODEJ
ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY**
Sídliště Klínky 2458/63, 697 01 Kyjov
tel./fax: 518 614 204, mobil: 603 338 678
IČO: 75770342, DIČ: CZ7607074343

Dne: 3. 4. 2008 razítko a podpis: