

Kontrolní protokol

o periodické bezpečnostně technické kontrole (PBTk) ZP dle zákona č.123/2000 Sb. v platném znění
K výkazu práce číslo: 029682

Přístroj	US 6 terapeutický ultrazvukový přístroj	výr.číslo	4314
Výrobce	TUR Dresden	třída/typ	I / BF
Zákazník	FN Olomouc, rehabilitace klinika RTVL- ambulance TVL	č. zak.	844/208

1. Kontrola bezpečnostních parametrů přístroje

Kontrola unikajících proudů nepřímou metodou	Unikající proud	Naměřená hodnota	Přípustná hodnota	✓/✗
	Síť - přístupná část	0,62 mA	1 mA	✓
	Síť - příložená část	0,446 mA	0,5 mA	✓
	Přístupná část - příložená část	0,682 mA	5 mA	✓
Kontrola přechodového odporu	Odpor ochranného vodiče	0,07 Ω	0,3 Ω	✓
	Délka pohyblivého přívodu	3 m		✓

2. Kontrola funkčních parametrů přístroje

Prohlídka přístroje – mechanická kontrola					✓
Kontrola funkce všech ovládacích prvků					✓
Kontrola ultrazvukových hlavic					✓
Kontrola časového spínače					✓
Test UZV generátoru a UZV hlavic	Výstup / UHL	frekvence	test kontaktu UHL	test přerušení kontaktu	
	OUT / 1,4cm ²	800 kHz	✓	✓	
	OUT / 6,4cm ²	800 kHz	✓	✓	

Poznámka:

- ✓ - vyhovuje
✗ - nevyhovuje

3. Poznámky , připomínky

Inventární číslo : I 016 860-000

Použité přístroje: MEDITEST 50, v.č. 976 104, Multimetr METEX M-4650CR v.č. EF711836,
osciloskop KIKUSUI v.č.28070426,

Závěr : Tento přístroj odpovídá technickým požadavkům výrobce a je možno jej používat ve zdravotnictví k péči o pacienta.

Datum provedení : 29.12.2006
Datum příští kontroly : 12/2007
Kontrolu provedl : Jilka Jaromír Ing.

Zasláno poštou

Ištuk Jiří.....

CHIRONAX Frýdek-Místek s.r.o.
Revoluční 1280

738 01 Frýdek-Místek

CHIRONAX
Frýdek-Místek s.r.o.



Revoluční 1280
738 01 Frýdek-Místek

-12-